



PETERMANN®
Hilfsmittel für immobile Menschen



*„Petermann –
weil jede Bewegung zählt“*

blue
MOTION
TRANSFERHILFEN

alpha
TRANSFERHILFEN

ONLYU
TRANSFERHILFEN

Inhaltsverzeichnis

Ihr schneller Überblick

		Allgemeines
	Über uns	4
	Produktübersicht	6
	YouTube Channel	13
	Schulungen/Seminare	14
		Alpha®
	Gleitmatten	19
	Transferlaken	23
	Aufricht- und Hebehilfen	29
	XXL-Produkte	33
	Rutschbretter	37
	Rollstuhl-Gleitmatten	38
	Transfertasche	39
	Rund ums Bett	41
	Radiologie	44
	Rollboards	46
		OnlyU®
	Rollboards	52
	Gleitfolien	55
	Folienhalterung	57
	Haltegürtel	59
		Blue Motion®
	Gleithilfen	62
		Evakuierung
	Evakuierungstuch	66

Innovationen

Wir wissen, was Sie brauchen

Produktideen von Petermann entstehen genau da, wo sie später gebraucht und genutzt werden – in der Praxis. Nahezu jedes Petermann Produkt lässt sich auf den Anspruch von Pflegenden oder Patienten bei der Bewältigung eines Bewegungsablaufs zurückführen. Die Petermann Teams sind in der Praxis unterwegs und erfahren täglich, wie anstrengend der Alltag von Pflegekräften und Menschen ist, die sich um bewegungseingeschränkte Personen kümmern, und welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen.

Qualität

Sichere Produkte für Ihre kompetente Pflege –
Made in Germany

Langjährige Erfahrung, modernste Fertigungstechniken, innovative Materialien und höchste Sorgfalt in der Produktion – diese Kriterien zeichnen die außerordentliche Qualität der Petermann Hilfsmittel aus.

Mit dem kontinuierlichen Streben nach Perfektion, immer noch bessere Materialien und Verarbeitungstechniken zu finden – verbunden mit sowohl in eigenen Prüflaboren wie auch in unabhängigen Testinstituten durchgeführten systematischen Qualitätsprüfungen – kann die Petermann GmbH garantieren, dass alle Produkte zu 100% den Anforderungen für Medizinprodukte entsprechen. Sie sind somit frei von jeglichen Schadstoffen und halten darüber hinaus selbst härtesten Belastungen und Anforderungen stand.

Petermann Produkte haben überdurchschnittliche Lebenszyklen. Die Garantieleistungen gehen mit bis zu 20 Jahren weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Die meisten Produkte sind auch für den Schwergewichtsbereich belastbar, einige Produkte bis zu 400 kg.

Wirtschaftlichkeit

Das beste Angebot für Sie

Moderne Gesundheitsökonomie betrachtet Wirtschaftlichkeit als Summe vieler Faktoren. Die Petermann GmbH bietet Ihnen faire Anschaffungspreise für Hilfsmittel mit langjährigen Lebenszyklen sowie für patientenbezogene Einmalprodukte, darüber hinaus viele Möglichkeiten, auf das Petermann Know-how beim Umgang mit den Produkten und Schulungen zurückzugreifen.

Die Petermann GmbH kennt die Bedürfnisse im Pflegebereich und weiß, dass Produkte auch nach vielen Waschgängen und Desinfektionsprozessen Pflegesicherheit für Anwender und Patienten gewährleisten müssen.



Rückenschonendes Bewegen von Patienten und Angehörigen

Lassen Sie sich „helfen“
und achten Sie auf Ihren Rücken!

Petermann Produkte unterstützen alle Pflegekräfte, rückengerecht zu arbeiten und Patienten schonend zu bewegen und zu transferieren. „Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher!“, ist der Petermann Leitspruch; das bedeutet, die Produkte den Pflegekräften und pflegenden Angehörigen mit unterschiedlichsten Ausbildungs- und Erfahrungsgraden einfach und effektiv zugänglich zu machen.

Damit alle so gut wie möglich mit unseren Produkten arbeiten können, bieten wir Produkt- und Intensivschulungen sowie komplette Bella Reha® Tagesseminare an, die den Umgang mit Petermann Produkten in der Praxis vermitteln und viele effektive und einfach anzuwendende Hilfestellungen geben.

Qualifizierte Kompetenz

Vertrauen Sie auf
Petermann Qualität

Die Petermann GmbH sieht sich als Pionier des rückenschonenden Arbeitens mit kleinen Hilfsmitteln in Deutschland. Über die Jahre haben die erfahrenen Produktspezialisten der Petermann GmbH viele Tausende von Schulungen und Seminaren in Pflegeheimen, Krankenhäusern, ambulanten Pflegediensten und medizinischen Einrichtungen durchgeführt. Dieses erworbene Wissen und die Erfahrungen bei der Petermann GmbH zusammenzuführen und als ganzheitliches Transferkonzept an Sie weiterzugeben, ist eine unserer wichtigsten Missionen.

Das Petermann-Qualitätsmanagementsystem erfüllt die Anforderungen der EN ISO 13485 und wird von unabhängigen Stellen geprüft und zertifiziert. So stellt die Petermann GmbH jederzeit die lückenlose Einhaltung der höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards von der Herstellung bis zur Anwendung sicher.


PETERMANN®
Hilfsmittel für immobile Menschen



Petermann® Schulungen/Seminare

Produktschulung PM-1020
Schulung ca. 90 Minuten

Produkt-Intensivschulung PM-1025
Schulung ca. 4 Stunden

Bella Reha Seminar PM-1120
Schulung ca. 7 Stunden

S. 14

Alpha® Caremaster
offene Gleitmatte




Caremaster M
Bestell-Nr. PM-2095
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2039
Größe 1750 x 600 mm
Material PES/Carbon

Caremaster XL
Bestell-Nr. PM-2097
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2039
Größe 1850 x 700 mm
Material PES/Carbon

S. 19

Alpha® Gleitmatte

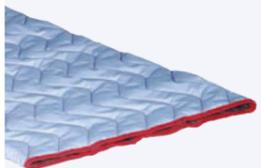

Gleitmatte
Bestell-Nr. PM-1010
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2008
Größe 1900 x 600 mm
Material PES/Carbon

S. 20

Alpha® Drehlaken
Set 3-teilig



Drehlaken-Set 3-teilig
Bestell-Nr. PM-1580
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2010

bestehend aus:
Drehlaken PM-1582
Spannbettuch PM-1584
Antirutschmatte PM-7010


Drehlaken
Bestell-Nr. PM-1582
Größe 1500 x 2000 mm
Material Cotton/
Naturdrell
atmungsaktiv

Spannbettuch
Bestell-Nr. PM-1584
Größe 2000 x 900 mm

Antirutschmatte
Bestell-Nr. PM-7010
Größe 350 x 250 mm

S. 23

Alpha® Gleitmatte

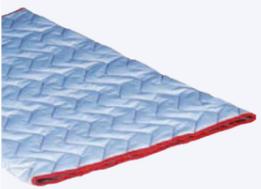

Gleitmatte Standard
Bestell-Nr. PM-1210
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
Größe 1000 x 700 mm
Material PES/Carbon

**Gleitmatte groß
PES/Carbon**
Bestell-Nr. PM-1215
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
Größe 1100 x 750 mm
Material PES/Carbon

Gleitmatte Standard
Bestell-Nr. PM-1220
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
Größe 1000 x 700 mm
Material Cotton/
Naturdrell
atmungsaktiv

S. 20

Alpha® Gleitmatte



Gleitmatte
Bestell-Nr. PM-2010
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
Größe 500 x 600 mm
Material PES/Carbon

Gleitmatte 2-teilig
Bestell-Nr. PM-2015
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
Größe 250 x 600 mm
Material PES/Carbon

S. 21

Alpha® Drehlaken
mit verdeckten Griffen, mehrteilig



Drehlaken-Set mehrteilig
Bestell-Nr. PM-1695
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2010

bestehend aus:
Drehlaken PM-2098
Spannbettuch PM-1584
Antirutschmatte PM-7010
Positionierungs-
keile PM-8010

Drehlaken mit Griffen
Bestell-Nr. PM-2098
Größe 2000 x 1000 mm
Material Cotton/
Naturdrell
atmungsaktiv

Spannbettuch
Bestell-Nr. PM-1584
Größe 2000 x 900 mm

Antirutschmatte
Bestell-Nr. PM-7010
Größe 350 x 250 mm

Positionierungskeile
Bestell-Nr. PM-8010
Größe 2 x Keil 250 x 220 x 130 mm
Größe 1 x Keil 500 x 220 x 130 mm

S. 24

Alpha® Gleitmatte



Gleitmatte
Bestell-Nr. PM-2020
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
Größe 500 x 600 mm
Material Cotton/
Naturdrell
atmungsaktiv

S. 21


Alpha® Gleitmatte



Gleitmatte
Bestell-Nr. PM-1420
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
Größe 1400 x 900 mm
Material Cotton/
Naturdrell
atmungsaktiv

S. 22

Alpha® Drehlaken Air Sheet
Set mehrteilig

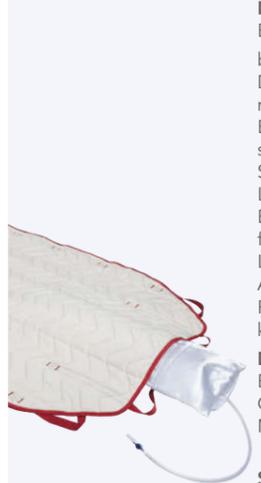

Drehlaken Air Sheet Set
Bestell-Nr. PM-1699

bestehend aus:
Drehlaken mit Tasche PM-2099.1
Befestigungs-
schlaufen-Set PM-2091
Spannbettuch PM-1584
Luftkissen PM-1232.1
Bezug für Luftkissen PM-1233
Luftpumpe PM-1234
Antirutschmatte PM-7010
Positionierungs-
keile PM-8010

Drehlaken mit Tasche
Bestell-Nr. PM-2099.1
Größe 2000 x 1000 mm
Material Cotton/Naturdrell
atmungsaktiv

Spannbettuch
Bestell-Nr. PM-1584
Größe 2000 x 900 mm

Luftkissen
Bestell-Nr. PM-1232.1
Größe 800 x 300 mm

Bezug für Luftkissen
Bestell-Nr. PM-1233

Luftpumpe
Bestell-Nr. PM-1234

Antirutschmatte
Bestell-Nr. PM-7010
Größe 350 x 250 mm

Positionierungskeile
Bestell-Nr. PM-8010
Größe 2 x Keil 250 x 220 x 130 mm
Größe 1 x Keil 500 x 220 x 130 mm

S. 27

Alpha® Positionierungskeile
Set 3-teilig



Positionierungskeile
Bestell-Nr. PM-8010
Größen
2 x Keil 250 x 220 x 130 mm
1 x Keil 500 x 220 x 130 mm
Material PU-rutschhemmend

S. 25

Alpha® Gleitmatte Air Sheet
Set mehrteilig



Gleitmatte Air Sheet Set
Bestell-Nr. PM-1230

bestehend aus:
Gleitmatte mit Tasche PM-1231
Luftkissen PM-1232.1
Bezug für Luftkissen PM-1233
Luftpumpe PM-1234

Gleitmatte mit Tasche
Bestell-Nr. PM-1231
Größe 1100 x 900 mm
Material Cotton/Naturdrell
atmungsaktiv

Luftkissen
Bestell-Nr. PM-1232.1
Größe 800 x 300 mm

Bezug für Luftkissen
Bestell-Nr. PM-1233

Luftpumpe
Bestell-Nr. PM-1234

S. 26

Alpha® Haltegürtel



Haltegürtel S
Bestell-Nr. PM-6013
für Umfang 60–110 cm

Haltegürtel M
Bestell-Nr. PM-6014
für Umfang 72–140 cm

Haltegürtel L
Bestell-Nr. PM-6015
für Umfang 100–170 cm

Material Polyamid

S. 29

Alpha® Schlaufengurt



Schlaufengurt
Bestell-Nr. PM-3010
Größe 1400 x 40 mm
Material Polyester
mit 2 Schlaufen
inkl. Clipverschlüssen

S. 30

Alpha® Aufrichthilfe Magic



Aufrichthilfe Magic mit flexiblem Halteband
 Bestell-Nr. PM-3015
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2038
 Größe 600 x 200 mm

Aufrichthilfe Standard
 Bestell-Nr. PM-3012
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2044
 Größe 600 x 200 mm
 Material Polyamid

S. 30

Alpha® Aufrichthilfe-Set
Magic und Beingurt im Paket

Aufrichthilfe-Set
 Bestell-Nr. PM-3025
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2038

bestehend aus:
 Aufrichthilfe Magic
 Beingurt

Beingurt
 Bestell-Nr. PM-3005
 Größe 1 000 x 220 mm
 Material PES/Carbon

Beingurt-Erweiterung
 Bestell-Nr. PM-3007
 Größe 500 x 220 mm
 Material PES/Carbon

S. 31

Alpha® Transfersystem 400



Transfersystem 400
 Bestell-Nr. PM-1501
 Größe 2 200 x 1 150 mm
 Material PES mit PVC

S. 33

Alpha® Tragesitz Swing



Tragesitz Swing
 Bestell-Nr. PM-4035
 Größe 380 x 430 x 550 mm
 Material Polyamid

S. 33

Alpha® Hebematte



Hebematte mit 4 Griffen
 Bestell-Nr. PM-4012
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2011
 Größe 1 100 x 530 mm

Hebematte mit 6 Griffen
 Bestell-Nr. PM-4016
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2011
 Größe 1 500 x 530 mm
 Material Polyamid

S. 32

Alpha® Transferhilfe Merlin



Transferhilfe Merlin, 3-teilig
 Bestell-Nr. PMM-1000
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.1069

bestehend aus:
 Transferhilfe PMM-1100
 Schlaufengurt PM-3010
 Aufstehhilfe PM-6160

Transferhilfe Merlin
 Bestell-Nr. PMM-1100
 Grundgestell 529 x 810 mm
 Fußplatte 410 x 465 mm
 Grundgestell Edelstahl

S. 35

Alpha® Aufstehhilfe Merlin



Aufstehhilfe Merlin
 Bestell-Nr. PM-6160
 für Umfang 70 –160 cm
 Material Polyamid

S. 35

Alpha® Gleitmatte Rollstuhl



Gleitmatte
 Bestell-Nr. PM-2070
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 500 x 450 mm
 Material Cotton/ Naturdrell atmungsaktiv

S. 38

Alpha® Gleitmatte Rollstuhl



Gleitmatte
 Bestell-Nr. PM-2076
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 1 300 x 450 mm
 Material Cotton/ Naturdrell atmungsaktiv

S. 38

Alpha® flexibles Rutschbrett




Rutschbrett mit abgerundeten Ecken
 Bestell-Nr. PM-5030
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.3000
 Größe 740 x 320 mm
 Material Polyethylen

Rutschbrett
 Bestell-Nr. PM-5050
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.3000
 Größe 740 x 320 mm
 Material Polyethylen

Kinder-Rutschbrett
 Bestell-Nr. PM-5020
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.3000
 Größe 580 x 320 mm
 Material Polyethylen

Rutschbrett mit Blue Motion Gleittuch im Set
 Bestell-Nr. PM-5031
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.3000
 bestehend aus:
 Rutschbrett PM-5030
 Gleittuch BM-0652

S. 37

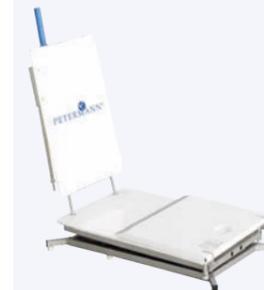Alpha® Aufrichthilfe Pegasus
3-teilig

Aufrichthilfe Pegasus 3-teilig
 Bestell-Nr. PM-4225

bestehend aus:
 Aufrichthilfe Pegasus PM-4222
 Aufrichthilfe Quick PM-6080
 Blue Motion Gleittuch BM-0652

Höhe min. 70 mm
 Höhe max. 420 mm
 Standfläche 360 x 640 mm

S. 36

Alpha® Aufrichthilfe Quick



Aufrichthilfe Quick
 Bestell-Nr. PM-6080
 Größe 1 450 x 70–130 mm
 Material Polyester

S. 36

Alpha® Transfertasche



Transfertasche
 Bestell-Nr. PM-7170
 Größe 750 x 430 x 150 mm
 Material PES/PVC

S. 39

Alpha® Gleitmatte Rollstuhl



Gleitmatte
 Bestell-Nr. PM-2078
 Hilfsmittel 22.29.01.2007
 Größe 1 350 x 430 mm
 Material Cotton/ Naturdrell atmungsaktiv

S. 39

Alpha® Röntgenmatte




Röntgenmatte 60 cm
 Bestell-Nr. PMF-8200
 Größe 1 900 x 600 mm

Röntgenmatte 85 cm
 Bestell-Nr. PMF-8220
 Größe 1 900 x 850 mm
 Material PVC/PES

S. 44

Alpha® Röntgenraupe

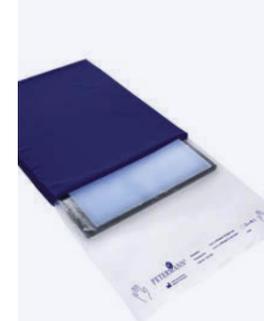

Röntgenraupe-Set 3-teilig
 Bestell-Nr. PMF-8265
 2 x Röntgenraupe PMF-8260
 1 x Schutzfolie PMF-8261

Röntgenraupe-Set 6-teilig
 Bestell-Nr. PMF-8266
 5 x Röntgenraupe PMF-8260
 1 x Schutzfolie PMF-8261

Röntgenraupe
 Bestell-Nr. PMF-8260
 Größe 410 x 535 mm
 Material Nylon/PE

Röntgenraupen-Set XL 3-teilig
 Bestell-Nr. PMF-8365
 2 x Röntgenraupe PMF-8360
 1 x Schutzfolie PMF-8361

Röntgenraupe-Set XL 6-teilig
 Bestell-Nr. PMF-8366
 5 x Röntgenraupe PMF-8360
 1 x Schutzfolie PMF-8361

Röntgenraupe XL
 Bestell-Nr. PMF-8360
 Größe 470 x 535 mm
 Material Polyamid/PE

S. 45

Alpha® Schutzfolie
Zubehör für Röntgenraupe

Schutzfolie
 Bestell-Nr. PMF-8261
 Größe 450 x 800 mm
 Material LDPE

Schutzfolie XL
 Bestell-Nr. PMF-8361
 Größe 510 x 800 mm
 Material LDPE

Perforiert auf einer Rolle zu 100 Stück

S. 45


Alpha® Fußstuhl



Fußstuhl
 Bestell-Nr. PM-8090
 Größe 320 x 380 x 85 mm
 Material Polyethylen

S. 41

Alpha® Antigleitkissen

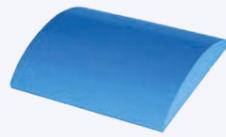

Antigleitkissen
 Bestell-Nr. PM-8050
 Größe 400 x 500 mm
 Material Polyethylen

S. 42

Alpha® Wandhalterung für Rollboards



Wandhalterung
 Bestell-Nr. PMF-0950
 Größe 750 x 450 x 90 mm
 Material Edelstahl

S. 49

Alpha® Wandhaken für Rollboards



Wandhaken
 Bestell-Nr. PMF-0850
 Material bruchsicherer Kunststoff

S. 49

Alpha® Drehscheibe



Drehscheibe
 Bestell-Nr. PM-5080
 Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2005
 Größe 400 mm
 Material ABS-Kunststoff

Drehscheibe, Fußstuhl und Haltegürtel im Set
 Bestell-Nr. PM-5085

bestehend aus:
 Drehscheibe PM-5080
 Fußstuhl PM-8090
 Haltegürtel (M)* PM-6014

* weitere Größen auf Anfrage

S. 41

Antirutschmatte



Antirutschmatte
 Bestell-Nr. PM-7010 rot
 PM-7010-1 blau
 Größe 350 x 250 mm
Antirutschmatte groß
 Bestell-Nr. PM-7011
 Größe 450 x 380 mm
 Material Dickfolie

S. 42

Alpha® Soft-Drehscheibe



Soft-Drehscheibe
 Bestell-Nr. PM-5070
 Durchmesser 460 mm
 Material Cotton/
 Naturdrell atmungsaktiv

S. 43

OnlyU® Rollboard Vision PEM



Rollboard Vision
 Bestell-Nr. PMF-9089
 Größe 950 x 500 mm
 faltbar
 PEM-Einweg-Bezug PM-9090
 Bestell-Nr. PMF-9153
 Größe 1500 x 600 mm
 faltbar
 PEM-Einweg-Bezug PMF-9152

Bestell-Nr. PMF-9175
 Größe 1800 x 500 mm
 faltbar
 PEM-Einweg-Bezug PM-9172

Material Rollboard Polyethylen

Einweg-Schutzfolie auf Rolle

Bestell-Nr. PMF-0191
 Größe 900 x 545 mm
 Menge 110 Stück
 Bestell-Nr. PMF-0192
 Größe 1800 x 545 mm
 Menge 55 Stück

PEM-Einweg-Bezug auf Rolle

Bestell-Nr. PMF-9090
 Größe 900 x 530 mm
 Menge 120 Stück
 Bestell-Nr. PMF-9152
 Größe 1600 x 610 mm
 Menge 120 Stück
 Bestell-Nr. PMF-9172
 Größe 1800 x 530 mm
 Menge 60 Stück


PEM-Einweg-Bezug gefaltet

Bestell-Nr. PMF-9077
 Größe 475 x 850 mm
 Menge 50 Stück

Weitere Rollboard-Varianten auf Seite 52

S. 52/53

OnlyU® PEM-Einweg-Gleitfolie

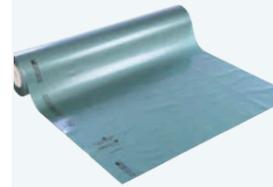

PEM-Einweg-Gleitfolie 60 cm
 Bestell-Nr. PM-060.60-100
 Größe 600 mm x 100 m

PEM-Einweg-Gleitfolie 60 cm mit Abrollkarton und Foliennmesser
 Bestell-Nr. PM-060.65-100
 Größe 600 mm x 100 m

PEM-Einweg-Gleitfolie 70 cm
 Bestell-Nr. PM-060.70-100
 Größe 700 mm x 100 m

PEM-Einweg-Gleitfolie 70 cm mit Abrollkarton und Foliennmesser
 Bestell-Nr. PM-060.75-100
 Größe 700 mm x 100 m

Material LDPE

S. 55

Alpha® Rollboard Vision



Rollboard Vision

Bestell-Nr. PMF-9050
 Größe 850 x 450 mm
 2-fach faltbar

Bestell-Nr. PMF-9075
 Größe 850 x 450 mm
 faltbar

Bestell-Nr. PMF-9085
 Größe 950 x 500 mm
 faltbar

Bestell-Nr. PMF-9095
 Größe 950 x 500 mm
 nicht faltbar

Bestell-Nr. PMF-9150
 Größe 1500 x 600 mm
 faltbar

Bestell-Nr. PMF-9155
 Größe 1500 x 600 mm
 nicht faltbar

Bestell-Nr. PMF-9170
 Größe 1800 x 500 mm
 faltbar

Bestell-Nr. PMF-9180
 Größe 1950 x 500 mm
 faltbar

Material:
 Rollboard Polyethylen
 Bezug Polyamid

Artikelnummern Ersatzbezüge siehe Seite 46

S. 46

Alpha® Bettleiter



Bettleiter
 Bestell-Nr. PM-6090
 Größe 1700 x 80 mm
 Material Polyester

S. 43

Alpha® Rollboard Vision für große Überbrückungswege




Rollboard Vision
 Bestell-Nr. PMF-9185
 Größe 1800 x 650 mm
 faltbar mit Zugschlaufen und Haltegriffen

Ersatzbezug PMF-9186

Material Rollboard Polyethylen
 Bezug Polyamid/PES

S. 49

Halterung für OnlyU® Produkte

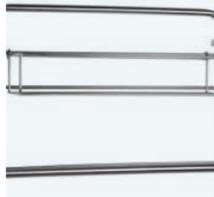

Folienhalterung
 Bestell-Nr. PMF-0200
 Größe 460 x 700 x 180 mm
 Material Edelstahl
 inkl. Korb für Ersatzfolie

S. 57

Abroller für OnlyU® Gleitfolie



Abroller für Rollenbreite 600 mm
 Bestell-Nr. PM-060.10

für Rollenbreite 700 mm
 Bestell-Nr. PM-060.30

S. 56

OnlyU® Einweg-Haltegürtel 5er Pack



Einweg-Haltegürtel
 Bestell-Nr. PM-070.10-5
 Größe 1600 x 100 mm
 Material Polyamid

S. 59

OnlyU® Einweg-Beingurt 5er Pack



Einweg-Beingurt
 Bestell-Nr. PM-075.10-5
 Größe 1130 x 100 mm
 Material Polyamid

S. 59

Blue Motion® Antirutschmatte
10er Pack



Antirutschmatte
Bestell-Nr. BM-7005
Größe 255 x 355 mm
Material Dickfolie

S. 62

Blue Motion® flexibles Rutschbrett



Rutschbrett
Bestell-Nr. BM-5000
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.3019
Größe 740 x 240 mm
Material Polyethylen

S. 62

Blue Motion® Gleittuch



Gleittuch
Bestell-Nr. BM-0560
Größe 520 x 600 mm
Bestell-Nr. BM-0652
Größe 600 x 520 mm
Bestell-Nr. BM-0752
Größe 700 x 520 mm
Bestell-Nr. BM-S-0790
Größe 700 x 900 mm
Bestell-Nr. BM-S-0907
Größe 900 x 700 mm
Bestell-Nr. BM-S-0910
Größe 900 x 1000 mm
Bestell-Nr. BM-S-0911
Größe 900 x 1100 mm
Bestell-Nr. BM-S-1170
Größe 1100 x 700 mm
Bestell-Nr. BM-S-1190
Größe 1100 x 900 mm
Bestell-Nr. BM-S-1370
Größe 1300 x 700 mm
Bestell-Nr. BM-S-1970
Größe 1950 x 700 mm
Material Polyamid

S. 62

Blue Motion® Wendelaken
Set 3-teilig



Wendelaken-Set
Bestell-Nr. BM-1600
bestehend aus:
Oberlaken BM-1600.1
2000 x 1400 mm
Spannlaken BM-1600.2
2000 x 900 mm
Blue Motion Antirutschmatte BM-7004 (2 St.)
Material Cotton/
Polyamid

S. 63

Blue Motion® Gleitlaken
mit Kordel



Gleitlaken
Bestell-Nr. BM-K-1975
Größe 1950 x 730 mm
Material Polyamid


S. 63

Evakuierungstuch



Evakuierungstuch
Bestell-Nr. PM-EVA-7053-H
für Bettgröße:
Länge 1900–2050 mm
Breite 800–1000 mm
Bestell-Nr. PM-EVA-7053-S
für Bettgröße:
Länge 1900–2050 mm
Breite 1000–1400 mm
Material PVC-
beschichtetes
Polyestergewebe
mit Lüftungs-
öffnungen

S. 66/67

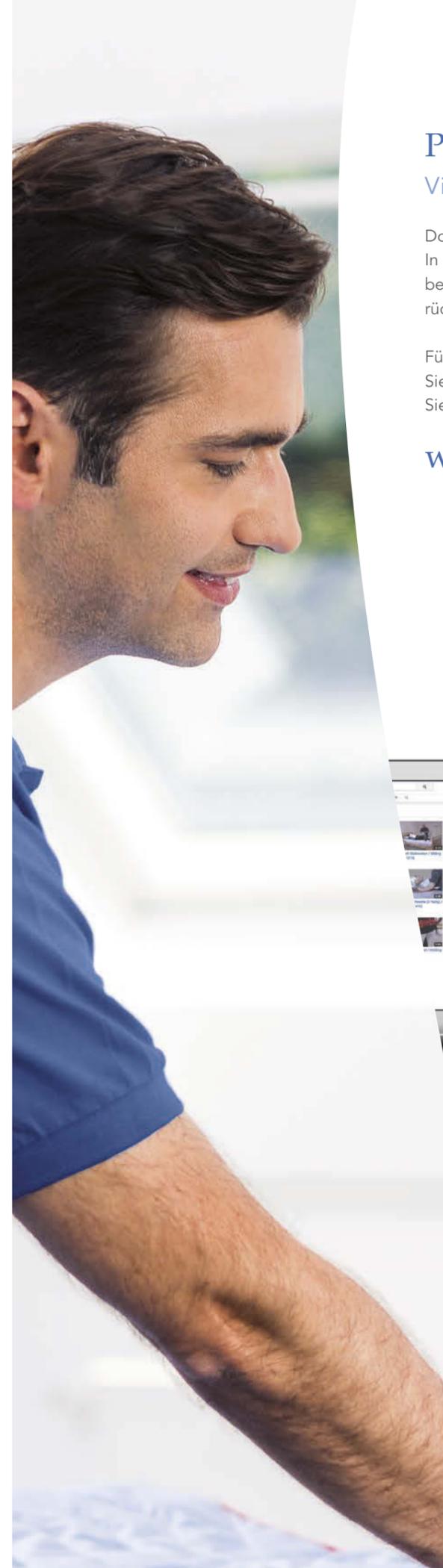

Petermann YouTube Channel

Videos zu unseren Produkten

Dort finden Sie immer die aktuellsten Videos zu unseren Produkten. In den Videos werden die Möglichkeiten der Anwendung ausführlich bei unterschiedlichen Allgemeinzuständen gezeigt und es wird auf rückengerechtes Arbeiten hingewiesen.

Für den professionellen Umgang mit Petermann Hilfsmitteln können Sie gerne eine Schulung mit uns vereinbaren. Weitere Infos finden Sie bei der Seminarübersicht.

www.pm-med.de

INFO

Bitte beachten Sie, dass unsere Videos keine Produktschulungen ersetzen!



„Schauen Sie mal rein
und besuchen Sie unseren
neuen YouTube Channel!“

Schulungsangebote

Weiterbildung bei Petermann

Es gibt viele Situationen im Laufe des Tages, in denen ein Patient, ein Pflegebedürftiger im häuslichen Bereich oder eine immobile Person die Position – unterstützt durch eine Pflegekraft – verändern möchte.

Durch den Einsatz von Hilfsmitteln kann die Belastung der Pflegekraft und des Patienten reduziert werden. Durch ein Hilfsmittel, das wie z. B. eine Gleitmatte den Reibungswiderstand reduziert, wird die Bewegung für den Patienten erleichtert und die Belastung der Pflegekraft reduziert.

Der Patient kann die Aktivitäten des täglichen Lebens mit Hilfsmitteln selbst bewältigen. Damit verbunden ist nicht nur eine gesteigerte Lebensqualität und somit psychische Gesundheit, sondern im pflegerischen Sinne auch eine Aktivierung, welche dazu führt, dass der Mensch seine Ressourcen besser nutzen kann, seine Mobilität erhält und so Dekubitus vorbeugt.

Nach Erkenntnissen der modernen Arbeitsmedizin sind die Menschen in Pflegeberufen arbeitsbedingt stark körperlich belastet. Oft kommt es zu Rückenschäden. Wir beraten Sie gerne, wie man mit aktiven Maßnahmen und Strategien Rückenbeschwerden vorbeugen kann.

Mit den professionellen Trainings-, Fortbildungs- und Seminarangeboten vermitteln wir in mehrstündigen Veranstaltungen verhaltenspräventive Maßnahmen und effektive, rückschonende Techniken für Pflegekräfte.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu Terminen und Vorbereitung.

Telefon: +49 (0)9868 9339-0

INFO

Im Anschluss an die Schulung haben Sie die Möglichkeit, einzelne Transferhilfen zur Ansicht auszuwählen und gemeinsam im Team das praktische Arbeiten zu trainieren. Dabei werden Sie in der Produktanwendung und -praxis beraten und betreut.



Produktschulung

Schulung ca. 90 Minuten
inkl. Teilnehmerzertifikate
2 Fortbildungspunkte*

- Grundlagen für rückengerechtes Arbeiten
- Umgang mit kleinen Hilfsmitteln und Hebehilfen sowie aktivierende Arbeitsweise

Produkt-Intensivschulung

Schulung ca. 4 Stunden
inkl. Teilnehmerzertifikate
3 Fortbildungspunkte*

- Grundlagen für rückengerechtes Arbeiten
- Umgang mit kleinen Hilfsmitteln und Hebehilfen sowie aktivierende Arbeitsweise
- Vertiefen vorhandener Grundkenntnisse im Teilbereich „Bewegen im Bett“ oder „Transfer“
- Entwicklung eines gemeinsamen Handlungsablaufes
- Zuordnung der gelernten Transfers zu den Bewohnern
- Praktisches Anwendungstraining

* Für die Teilnahme können die aufgeführten Fortbildungspunkte bei der Registrierung beruflich Pflegender® angerechnet werden.



Bella Reha Seminar

Schulung ca. 7 Stunden
inkl. Teilnehmerzertifikate
8 Fortbildungspunkte*

Das Bella Reha Seminar „Anwendung von kleinen Hilfsmitteln unter Berücksichtigung pflegetherapeutischer Konzepte und ergonomischer Arbeitsweise“ verbindet die Bewegung von Pflegenden und betroffenen Personen mit kleinen Hilfsmitteln. Rückengerechtes Arbeiten und die Grundlagen therapeutischer Konzepte wie beispielsweise Aktivitas-Pflege®, Kinästhetik und Bobath werden verknüpft.

„Professionelle Wahrnehmung der Bewegungsfähigkeit“

- Grundlagen der physiologischen Bewegung
- Schulung der Wahrnehmung individueller Bewegungsressourcen von Betroffenen und Pflegenden
- Therapeutische Grundlagen und praxisorientierte Umsetzungsmöglichkeiten
- Prävention durch rückengerechte Abläufe am Bett
- Professioneller Einsatz von kleinen Hilfsmitteln




alpha 
TRANSFERHILFEN



Alpha® Caremaster offene Gleitmatte


Die Alpha Gleitmatte Caremaster erleichtert die Pfl egetätigkeit erheblich. Scherkräfte können nahezu vollständig ausgeschlossen werden. Die Alpha Gleitmatte Caremaster ist besonders vielseitig in ihren Anwendungsmöglichkeiten und wird für alle möglichen Positionswechsel im Liegen und für Transfers im Bett verwendet. Sie unterstützt einen sicheren Halt und einen Impuls gebenden Bewegungsablauf, ohne den Patienten während des Transfers in Problemzonen anfassen zu müssen. Da hier auf die sonst übliche Tunnelform verzichtet wurde, können mittels der Zugschlaufen mühelos Bewegungen zum Kopfende und zur Seite ausgeführt werden, ohne das Hilfsmittel neu Aus- und Einbringen zu müssen.

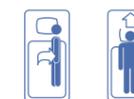

Die weiche Polsterung ermöglicht einen bequemen Transfer



Kopfauflage zum schonenden Transfer

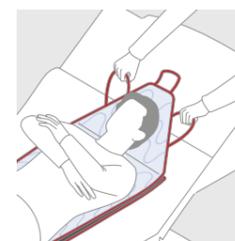

Verbunden mit den drei extra zugfesten Gewebeschlaufen ist die offene Alpha Gleitmatte sehr gut für schwergewichtige Personen geeignet

Caremaster M	
Bestell-Nr.	PM-2095
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2039
Größe	1750 x 600 mm
Material	PES/Carbon

Caremaster XL	
Bestell-Nr.	PM-2097
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2039
Größe	1850 x 700 mm
Material	PES/Carbon

Sondergrößen auf Anfrage!



CE = 200 kg

Alpha® Gleitmatte

Alpha Gleitmatten erleichtern besonders gut den Patiententransfer im Bett, da sie den Reibungswiderstand erheblich reduzieren. Je nach Funktionsbild des Patienten unterstützen Alpha Gleitmatten in der Anwendung gleichzeitig den Brustkorb und das Becken für das Lagern und Drehen auf die Seite. Eine weitere Einsatzmöglichkeit, wie das Umlagern eines schweren, besonders pflegebedürftigen oder prämedizierten Patienten von der Rücken- in die Bauchlage, ist mit den Alpha Gleitmatten möglich.



Die Außenfläche der Alpha Gleitmatte ist wahlweise aus PES/Carbon oder Cotton/Naturdrell (PM-1220)



Gleitmatte Standard

Bestell-Nr. PM-1210
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
 Größe 1 000 x 700 mm
 Material PES/Carbon

Gleitmatte groß

Bestell-Nr. PM-1215 (o. Abb.)
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
 Größe 1 100 x 750 mm
 Material PES/Carbon

Gleitmatte Standard

Bestell-Nr. PM-1220 (o. Abb.)
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
 Größe 1 000 x 700 mm
 Material Cotton/Naturdrell atmungsaktiv



Alpha® Gleitmatte



Robuste Nähte erhöhen die Lebensdauer der Alpha Gleitmatte



Die Alpha Gleitmatten sind weich gepolstert und bieten auch einen guten Schutz vor Verletzungen an den Fersen beim Bewegen zum Kopfende



Gleitmatte

Bestell-Nr. PM-2010
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 500 x 600 mm
 Material PES/Carbon

Gleitmatte 2-teilig

Bestell-Nr. PM-2015
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 250 x 600 mm
 Material PES/Carbon


Alpha® Gleitmatte



Bestell-Nr. PM-1010
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2008
 Größe 1 900 x 600 mm
 Material PES/Carbon



Die Länge der Alpha Gleitmatte entspricht der Körpergröße

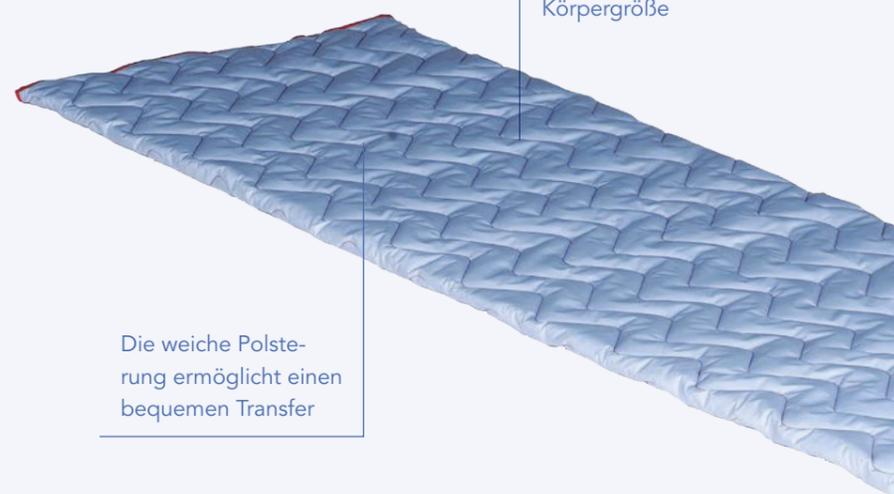

Die weiche Polsterung ermöglicht einen bequemen Transfer

Alpha® Gleitmatte



Bestell-Nr. PM-2020
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 500 x 600 mm
 Material Cotton/Naturdrell atmungsaktiv



Die Außenfläche der Alpha Gleitmatte ist aus atmungsaktivem Cotton/Naturdrell, was einen dauerhaften Verbleib der Alpha Gleitmatte unter dem Patienten ermöglicht



Die Alpha Gleitmatte reduziert die Scher- und Reibungskräfte im Fersenbereich. Die Gleitmatte kann präventiv, unterstützend und zur Therapie eingesetzt werden

Alpha® Gleitmatte

Diese Alpha Gleitmatte ist speziell für Patienten entwickelt, die häufig umgelagert werden müssen oder die besonders schmerzempfindlich sind und auf jede Berührung bzw. Lageveränderung mit Schmerzen reagieren.

Die Alpha Gleitmatte wird vor allem zum Drehen im Bett oder zum Lagern auf die Seite verwendet. Kann sich der Patient nicht selbstständig mit der Alpha Gleitmatte bewegen, kann ein Stecklaken als Ziehtuch eingebettet werden.

Die Alpha Gleitmatte hat am oberen Ende vier feste Bänder. Mit diesen kann sie bei Bedarf am Kopfende des Bettes am Lattenrost befestigt werden, um z. B. das Herunterrutschen eines im Bett sitzenden Patienten zu verhindern. Sie deckt das Bett in seiner gesamten Breite und 3/4 der Länge ab.



Bestell-Nr. PM-1420
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2009
 Größe 1 400 x 900 mm
 Material Cotton/Naturdrell atmungsaktiv



Die Außenfläche der Alpha Gleitmatte ist aus atmungsaktivem Cotton/Naturdrell

Die Alpha Gleitmatte kann mit Bändern am Kopfende des Bettes befestigt werden



Alpha® Drehlaken

Set 3-teilig

Dieses Alpha Drehlaken besteht aus drei Teilen: einem Spannbettuch, welches auf die Matratze gezogen wird, einem großen Oberlaken sowie einer Antirutschmatte. Die Oberseite des Oberlakens besteht aus Cotton/Naturdrell.

Das Alpha Drehlaken wird bei Patienten, die besonders schmerzempfindlich sind, sowie bei schweren oder besonders pflegebedürftigen Patienten eingesetzt. Verlagern und das seitliche Umlagern von Patienten wird ganz erheblich erleichtert. Durch das Einrollen des Alpha Drehlakens an den Körper des Patienten in Seitenlage und die anschließende Fixierung durch das Bettuch lässt sich eine einfache und schonende Seitenlagenstützung erreichen.



Das Alpha Drehlaken ist weich und sehr anpassungsfähig



Drei Bänder ermöglichen die Befestigung am Kopfende des Bettes



Drehlaken-Set 3-teilig

Bestell-Nr. PM-1580
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2010
 bestehend aus:
 Drehlaken PM-1582
 Spannbettuch PM-1584
 Antirutschmatte PM-7010

Drehlaken

Bestell-Nr. PM-1582
 Größe 1 500 x 2 000 mm
 Material Cotton/Naturdrell atmungsaktiv

Spannbettuch

Bestell-Nr. PM-1584
 Größe 2 000 x 900 mm

Antirutschmatte

Bestell-Nr. PM-7010
 Größe 350 x 250 mm

Geeignet für Betten in den Größen 900/1 000 x 2 000 mm. Sondergrößen auf Anfrage.



PM-1584 Spannbettuch



PM-7010 Antirutschmatte

Alpha® Drehlaken

Set mehrteilig

Dieses Alpha Drehlaken wurde speziell für Patienten entwickelt, die besonders schmerzempfindlich sind. Durch die Verarbeitung von atmungsaktiven Textilprodukten kann der Patient dauerhaft auf dem Drehlaken verbleiben. Die verdeckten Griffe und Zugschlaufen des Drehlakens ermöglichen der Pflegeperson, den Patienten im Bett frei und schonend in die angestrebte Pflegesituation zu bewegen. Die zusätzlich an den Außenseiten angebrachten Stopp-Streifen auf dem Spannbettuch sowie die Antirutschmatte sorgen für die nötige Sicherheit. Jede Form der Lagerung, beispielsweise Mikrolagerung oder Lagerung in Neutralposition (LIN), ist ohne Kraftaufwand und Scherkräfte möglich. Alle Positionierungskeile können zwischen den beiden Seidenschichten angelegt werden.



Zugschlaufen zum Hochziehen des Patienten im Bett



PM-2098 Drehlaken



PM-1584 Spannbettuch



PM-7010 Antirutschmatte

Drehlaken-Set mehrteilig

Bestell-Nr.	PM-1695
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2010
bestehend aus:	
Drehlaken mit Griffen	PM-2098
Spannbettuch	PM-1584
Antirutschmatte	PM-7010
Positionierungskeile	PM-8010

Drehlaken mit Griffen

Bestell-Nr.	PM-2098
Größe	2000 x 1000 mm
Material	Cotton/Naturdrell atmungsaktiv

Spannbettuch

Bestell-Nr.	PM-1584
Größe	2000 x 900 mm

Antirutschmatte

Bestell-Nr.	PM-7010
Größe	350 x 250 mm

Positionierungskeile

Bestell-Nr.	PM-8010
2 x Positionierungskeil	250 x 220 x 130 mm
1 x Positionierungskeil	500 x 220 x 130 mm

Sondergrößen auf Anfrage

Nicht geeignet für 135°-Lagerung!
(Alternative: Drehlaken PM-1580)




Alpha® Positionierungskeile

Set 3-teilig

Die Alpha Positionierungskeile wurden für die aktive und korrigierende Positionierung von pflegebedürftigen Menschen entwickelt. Durch den variablen Einsatz kann je nach geplanter pflegerischer Maßnahme eine ziel- und zweckorientierte Positionierung durchgeführt werden.

Bestell-Nr.	PM-8010
Größe	
2 x Positionierungskeil	250 x 220 x 130 mm
1 x Positionierungskeil	500 x 220 x 130 mm
Material	PU-rutschhemmend

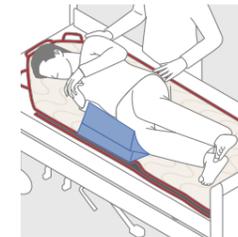




Positionierungsvariante für Verbandswechsel am Steiß sowie zur Grundpflege und zum Wechsel des Inkontinenzmaterials (sichere und stabile Lagerung bis 135°)



Positionierungsvariante bei Nahrungsaufnahme bzw. zur Sicherung gegen das Herunterrutschen bei gewünschter Sitzposition im Bett



Zeichnungen oben, Mitte und unten: Lagerungsvariante für Seitenlagerung sowie für Positionsveränderung durch Mikrolagerungen, besonders in Kombination mit den Alpha Gleitmatten und Drehlaken.

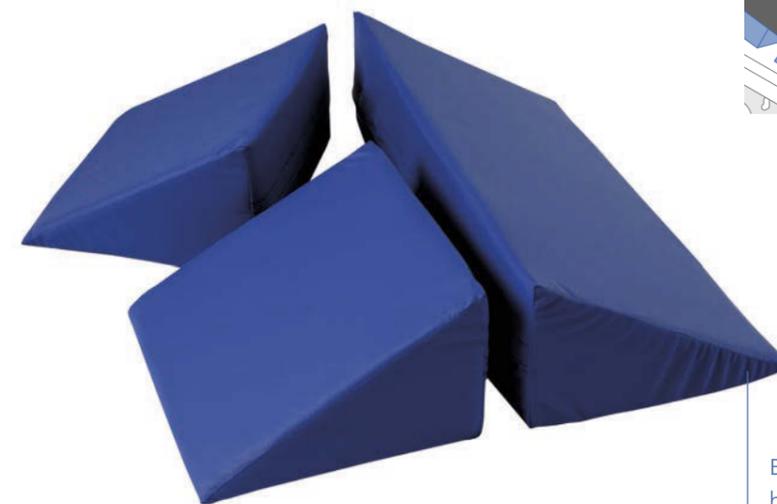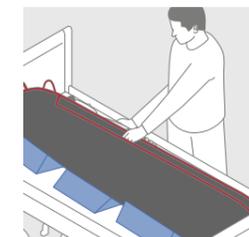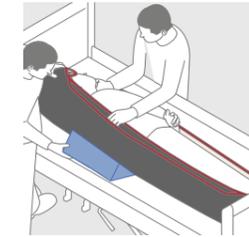

Bezug besteht aus hautfreundlichem PU-Material

Alpha® Gleitmatte Air Sheet Set mehrteilig

Die Alpha Gleitmatte Air Sheet eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der Bewegung und dem Positionieren von pflegebedürftigen Menschen. Durch die innovative Einbindung eines Luftpolsters mit variabel einstellbarer Luftmenge reichen schon kleine Impulse der Pflegekräfte oder auch des Pflegebedürftigen selbst, um Bewegungen zur Seite ausführen zu können.



Das hochwertige, atmungsaktive Material ermöglicht einen dauerhaften Verbleib der Pflegebedürftigen auf dem Alpha Air Sheet



Durch die innovative Einbindung eines Luftpolsters, reichen schon kleine Impulse um die Bewegungen zur Seite erheblich zu erleichtern



Gleitmatte Air Sheet Set

Bestell-Nr. PM-1230

bestehend aus:

Gleitmatte mit Tasche	PM-1231
Luftkissen	PM-1232.1
Bezug für Luftkissen	PM-1233
Luftpumpe	PM-1234

Gleitmatte mit Tasche

Bestell-Nr. PM-1231

Größe	1 100 x 800 mm
Material	Cotton/Naturdrell atmungsaktiv

Luftkissen

Bestell-Nr. PM-1232.1

Größe	800 x 300 mm
-------	--------------

Bezug für Luftkissen

Bestell-Nr. PM-1233


Luftpumpe

Bestell-Nr. PM-1234



Alpha® Drehlaken Air Sheet Set mehrteilig

Das Alpha Drehlaken Air Sheet verbindet die Stärken des Alpha Drehlaken Sets mit den einzigartigen Möglichkeiten des Alpha Air Sheet. Die verdeckten Griffe und Zugschlaufen des Drehlakens ermöglichen der Pflegeperson den Pflegebedürftigen im Bett frei und schonend in die angestrebte Pflegesituation zu bewegen. Durch die innovative Einbindung eines Luftpolsters mit variabel einstellbarer Luftmenge reichen schon kleine Impulse der Pflegekräfte oder auch des Pflegebedürftigen selbst, um Bewegungen zur Seite ausführen zu können.

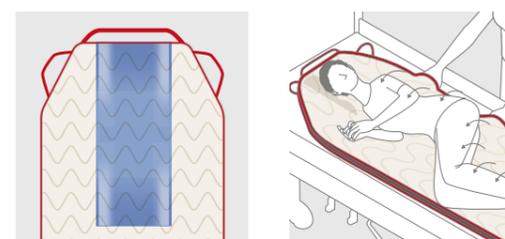

Das Luftpolster ist komplett herausnehmbar und mit einem waschbaren Bezug versehen



Drehlaken Air Sheet Set

Bestell-Nr. PM-1699

bestehend aus:

Drehlaken mit Tasche	PM-2099.1
Befestigungsschlaufen-Set	PM-2091
Spannbetttuch	PM-1584
Luftkissen	PM-1232.1
Bezug für Luftkissen	PM-1233
Luftpumpe	PM-1234
Antirutschmatte	PM-7010
Positionierungskeile	PM-8010

Drehlaken mit Tasche

Bestell-Nr. PM-2099.1

Größe	2 000 x 1 000 mm
Material	Cotton/Naturdrell atmungsaktiv

Befestigungsschlaufen-Set

Bestell-Nr. PM-2091

Spannbetttuch

Bestell-Nr. PM-1584

Größe	2 000 x 900 mm
-------	----------------

Luftkissen

Bestell-Nr. PM-1232.1

Größe	800 x 300 mm
-------	--------------

Bezug für Luftkissen

Bestell-Nr. PM-1233

Luftpumpe

Bestell-Nr. PM-1234

Antirutschmatte

Bestell-Nr. PM-7010

Größe	350 x 250 mm
-------	--------------

Positionierungskeile

Bestell-Nr. PM-8010

2 x Positionierungskeil	250 x 220 x 130 mm
1 x Positionierungskeil	500 x 220 x 130 mm



Alpha® Haltegürtel

Der Alpha Haltegürtel besteht aus einem gepolsterten Polyamid mit Antirutsch-Eigenschaft im Innenbereich. Er wird dem Patienten und/oder der Pflegekraft um die Taille gelegt und mit Hilfe einer Schnalle verschlossen. Der Alpha Haltegürtel hat mehrere Griffe, so kann die Pflegekraft den Bewegungsablauf steuern und unsichere Patienten unterstützen. Der Alpha Haltegürtel unterstützt das Aufstehen und Hinsetzen bzw. das Umsetzen eines Patienten. Unsichere oder kreislaufinstabile Patienten können gut gehalten werden, ohne dass sie am Arm gegriffen werden müssen.



Haltegürtel S

Bestell-Nr. PM-6013
für Umfang 60–110 cm

Haltegürtel M

Bestell-Nr. PM-6014
für Umfang 72–140 cm

Haltegürtel L

Bestell-Nr. PM-6015
für Umfang 100–170 cm

Material Polyamid



Auch beim Aufrichten ist der Alpha Haltegürtel eine sichere Hilfe

Die Innenseite ist mit einem rutschfesten Material versehen, welches an der Kleidung haftet

Vertikale und horizontale Griffe erleichtern die Handhabung

Das widerstandsfähige Außenmaterial Polyamid erhöht die Lebensdauer des Alpha Haltegürtels

Der Verschluss ist einfach zu benutzen



Alpha® Aufrichthilfe Magic

Mit der Alpha Aufrichthilfe Magic können Sie den Patienten beim Aufstehen, Hinsetzen und besonders beim Umsetzen sicher halten und führen. Die einfache Handhabung lässt sich im Einsatz sehr gut mit der rückengerechten Arbeitsweise und Elementen aus den Pflegekonzepten verbinden. Die Alpha Aufrichthilfe Magic ist beliebig mit anderen Hilfsmitteln kombinierbar, je nach Bedarf und Funktionsbild des Patienten.



Extrem stabile Tragegriffe bieten zusätzliche Sicherheit



Mit flexiblem Halteband


Aufrichthilfe Magic mit flexiblem Halteband

Bestell-Nr.	PM-3015
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2038
Patent-Nr.	10 2009 019 716 B3
Größe	600 x 200 mm
Material	Nylon

Aufrichthilfe Standard

Bestell-Nr.	PM-3012 (o. Abb.)
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2044
Größe	600 x 200 mm
Material	Polyamid

Mit herausnehmbarem Innenteil durch Klettverschluss und flexiblem Halteband

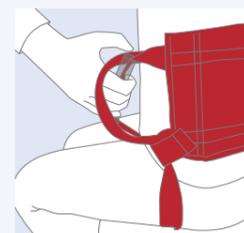

Alpha® Aufrichthilfe-Set Magic und Beingurt im Paket

Der Alpha Beingurt unterstützt das Umsetzen des Patienten in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder den Autositz. Der Alpha Beingurt kann gut mit der Aufrichthilfe, dem Rutschbrett, der Drehscheibe oder dem Haltegürtel kombiniert werden. So wird der Transfer erheblich rückengerechter für die Pflegekraft und schonender, leichter für den Patienten. Der Alpha Beingurt wird auf Kniehöhe sanft um die Beine des sitzenden Patienten gelegt und mit dem Klettverschluss verbunden. Die Pflegekraft stellt jetzt ihren Fuß zwischen die Beine des Patienten, so dass sie mit ihrem Knie einen konsequenten Druck auf die Polsterung des Alpha Beingurtes ausüben kann. Der Beingurt unterstützt durch diese Sicherung das Stehvermögen des Patienten und erlaubt der Pflegekraft die Drehbewegung zu stabilisieren.



Aufrichthilfe-Set

Bestell-Nr.	PM-3025
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2038
bestehend aus:	
Aufrichthilfe Magic	PM-3015
Beingurt	PM-3005

Beingurt

Bestell-Nr.	PM-3005
Größe	1 000 x 220 mm
Material	PES/Carbon

Beingurt-Erweiterung

Bestell-Nr.	PM-3007 (o. Abb.)
Größe	500 x 220 mm
Material	PES/Carbon




Auch beim Aufrichten und beim Stand ist das Alpha Aufrichthilfe-Set eine sichere Unterstützung



Alpha® Schlaufengurt

Der Alpha Schlaufengurt verhindert bei fehlender Körperspannung ein Durchrutschen des Patienten beim Umsetzen. Die beiden Schlaufen werden an den Griffen von Aufrichthilfe Magic/Aufrichthilfe Standard/Aufrichthilfe Merlin angebracht und mit Hilfe der Clipverschlüsse unter den Beinen des Patienten angelegt.

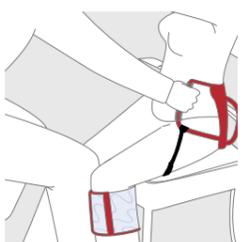

Bestell-Nr.	PM-3010
Größe	1 100 x 40 mm
Material	Polyester
mit 2 Schlaufen inkl. Clipverschlüssen	



Mit stabilen Clipverschlüssen



Alpha Aufrichthilfe-Set PM-3025: Magic (PM-3015) und Beingurt (PM-3005)


Optimal einstellbar durch extra breites Klettband



Alpha® Hebematte

Mit der Alpha Hebematte kann ein im Bett liegender Patient zum Kopfende und auf die Seite bewegt werden, ein Transfer z. B. vom Bett auf die Duschieliege ist möglich.

Unter der Alpha Hebematte ist eine strapazierfähige Gleitfläche vernäht. Die Gleitfläche verringert erheblich den Reibungswiderstand zwischen Patient und Transferebene. Die Seitenflügel lassen sich zusammen mit den Griffen leicht einklappen und somit die Alpha Hebematte durch ein einfaches Einlegen über die Halbseitenlage optimal unter den Patienten bringen. Das Innenteil der Alpha Hebematte kann zum Waschen oder Desinfizieren herausgenommen werden. Das Aufheben von liegenden Patienten mit der Alpha Hebematte vom Boden durch mehrere Personen ist für den Patienten sicher und für die Hilfspersonen rückengerecht möglich.

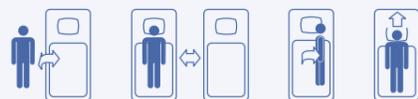

Hebematte mit 4 Griffen


Bestell-Nr.	PM-4012
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2011
Größe	1 100 x 530 mm
Material	Nylon

Hebematte mit 6 Griffen

Bestell-Nr.	PM-4016 (o. Abb.)
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2011
Größe	1 500 x 530 mm
Material	Polyamid



Die Alpha Hebematte gibt es mit vier oder mit sechs Griffen

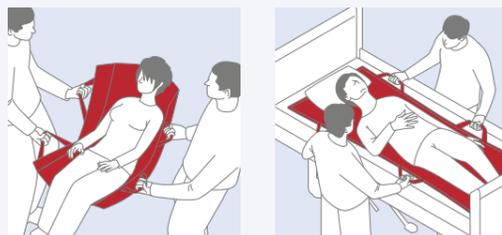

Die Alpha Hebematte ermöglicht nicht nur den Transfer des Patienten von einer Liege in das Bett, sie unterstützt die Pflegekräfte auch beim Aufheben des Patienten vom Boden

Die gepolsterte Auflage bietet dem Patienten hohen Komfort



Die Alpha Hebematte ist faltbar, um besser eingebettet werden zu können



Alpha® Transfersystem 400

Alpha Transfertuch und PEM-Einweg-Gleitfolie – Transfersystem für schwergewichtige Personen. Die Kombination zusammen mit der PEM-Einweg-Gleitfolie lässt individuell eine Vielzahl von Transferanwendungen auf unterschiedlichen Ebenen zu.




Mehr zur PEM-Einweg-Gleitfolie auf Seite 55

Bestell-Nr.	PM-1501
Mit 12 Trageschlaufen: je 4 an den Längsseiten, 2 an der Kopfseite, 2 an der Fußseite	
Größe Transfertuch	2 200 x 1 150 mm
Belastung max.	400 kg
Material Transfertuch	PES mit PVC

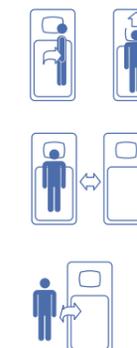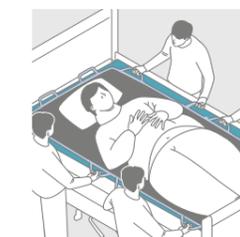

Alpha® Tragesitz Swing

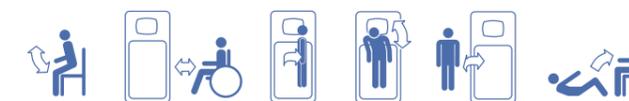


Für Treppen und Transfers, speziell in Situationen, in denen aus räumlichen Gründen kein selbsttätiges Hilfsmittel zum Einsatz kommt, erlaubt der Alpha Tragesitz Swing einen weitgehend kontrollierten Personentransfer. Auf bis zu fünf, auch unterschiedlich große Personen, kann das Gewicht des Patienten rückengerecht bei der Anwendung verteilt werden.



Sehr stabile Sicherheitsgriffe

Bestell-Nr.	PM-4035
Größe	T 380 x B 430 x H 550 mm
Material	Polyamid

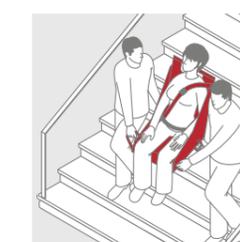

Der Alpha Tragesitz ist für den Einsatz in schwierigen Situationen, z. B. bei Treppen, geeignet



In Kombination mit dem Rollboard Vision (siehe Seite 46) kann eine liegende Person auf den aufgeklappten Tragesitz umgelagert werden



Alpha[®] Transferhilfe Merlin

Die Alpha Transferhilfe Merlin, optional anwendbar mit Halte- und Schlaufengurt, ist ein einfaches und sicheres Hilfsmittel zur Unterstützung des Aufstehens und Umsetzens von bewegungseingeschränkten Menschen. Die Alpha Transferhilfe Merlin ermöglicht zum einen den Pflegekräften leichtere, kraftsparende und rückenfreundliche Transfers der Patienten, zum anderen kann er ggf. die Restkräfte in Armen und Beinen der Patienten mobilisieren und ihnen zudem ein Gefühl der Sicherheit vermitteln.

Hochwertiger Edelstahl für langlebigen korrosionsfreien Einsatz

Das ausgeklügelte Design im Zusammenspiel mit den leichtgängigen Rollen erlaubt ein besonders sicheres und einfaches Handling der Alpha Transferhilfe Merlin. Der hochwertige Edelstahl ermöglicht zudem maximale Stabilität und hält Desinfektionsprozessen auch nach vielfacher Anwendung problemlos und vollkommen rostfrei stand.



Müheles teilbar

Transferhilfe Merlin, 3-teiliges Set

Bestell-Nr.	PMM-1000
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.1069
bestehend aus:	
Transferhilfe Merlin	PMM-1100
Schlaufengurt	PM-3010
Aufrichthilfe	PM-6160

Transferhilfe Merlin

Bestell-Nr.	PMM-1100
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.1069
Größe Grundgestell	529 x 810 mm
Abmessung Fußplatte	410 x 465 mm
Material	
Grundgestell	Edelstahl
Kniepolster	PU-Schaum
Bodenplatte	strukturierte Kunststoffolie



Müheles teilbar

Alpha[®] Aufstehhilfe Merlin

Die Alpha Aufstehhilfe Merlin dient zur Unterstützung eines Patienten beim Aufstehen und Hinsetzen bzw. beim Umsetzen eines Patienten in den Rollstuhl, auf die Toilette oder den Stuhl. Die Pflegekraft kann den Bewegungsablauf sehr gut steuern, korpulente Patienten oder instabile und unsichere Patienten können sicherer gehalten werden. Ängstlichen Patienten wird ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Die Alpha Aufstehhilfe Merlin wird dem Patienten um die Hüfte gelegt und mit Hilfe eines in der Weite verstellbaren Schnellverschlusses geschlossen.



Aufstehhilfe Merlin

Bestell-Nr.	PM-6160.2
für Umfang	70–160 cm
Material	Polyamid



Alpha® Aufrichthilfe Pegasus 3-teilig

Überall, wo Menschen mit Handicap stürzen und sich mit eigener Körperkraft nicht oder nur sehr schwer vom Boden in einen Sitzbereich bewegen können, leistet die Alpha Aufrichthilfe Pegasus eine effiziente Hilfestellung. Sie ist sehr klein, sicher, kompakt und federleicht mechanisch zu bedienen. Die Alpha Aufrichthilfe Pegasus ist jederzeit bereit, die Person nach einer Fallsituation so zu unterstützen, dass sie sich alleine oder mit Hilfe aus einer Liegeposition in eine transfere Sitzposition bewegen kann. Die Alpha Aufrichthilfe Pegasus eignet sich für zu Hause und ideal für den stationären wie ambulanten Einsatz, um zu unterstützen und zu helfen.



Aufrichthilfe Pegasus 3-teilig

Bestell-Nr.	PM-4225
bestehend aus:	
Aufrichthilfe Pegasus	PM-4222
Aufrichthilfe Quick	PM-6080
Blue Motion Gleittuch	BM-0652
Höhe min.	70 mm
Höhe max.	420 mm
Standfläche	360 x 640 mm
Gewicht	9,5 kg
Material	Edelstahl
Bedienung	über eine Handkurbel



Auf Rollstuhl-
höhe
kurbelbar

Lehne abnehmbar



Alpha® Aufrichthilfe Quick

Die Alpha Aufrichthilfe Quick ist ein universelles Hilfsmittel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Die Kombination mit dem Rutschbrett bewährt sich beim Umsetzen des Patienten, z. B. in den Rollstuhl.

PM-6080

Bestell-Nr.	PM-6080
Größe	1450 x 70-130 mm
Material	Polyester



Alpha® flexibles Rutschbrett

Alpha Rutschbretter sind flexibel und passen sich dem Patienten und seiner Umgebung an. Sie besitzen eine sehr glatte Oberfläche, um den Reibungswiderstand zu minimieren. Sie erleichtern das Umsetzen eines Patienten, z. B. von der Bettkante in den Rollstuhl, auf die Toilette oder auf den Autositz. Dabei lassen sich Alpha Rutschbretter aufgrund ihrer flexiblen Konstruktion ohne Kippgefahr leicht ein- und ausbringen. Der Patient muss nicht aufstehen können, sondern kann sitzend selbstständig oder ggf. mit Unterstützung den Positionswechsel vornehmen.



Die Antirutschstreifen verhindern das Wegrutschen des Brettes auf der Unterlage



Das Alpha Rutschbrett eignet sich gut in Kombination mit den Blue Motion Gleittüchern

flexibles Rutschbrett mit abgerundeten Ecken

Bestell-Nr.	PM-5030
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.3000
Größe	740 x 320 mm

flexibles Rutschbrett

Bestell-Nr.	PM-5050
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.3000
Größe	740 x 320 mm

flexibles Kinder-Rutschbrett

Bestell-Nr.	PM-5020 (o. Abb)
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.3000
Größe	580 x 320 mm
Material	Polyethylen



Das flexible Alpha Rutschbrett ermöglicht das Umsetzen eines Patienten in den Rollstuhl, auf die Toilette oder den Autositz

Rutschbrett und Blue Motion Gleittuch im Set

Bestell-Nr.	PM-5031
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.3000
bestehend aus:	
flexibles Rutschbrett	PM-5030
Gleittuch	BM-0652



Alpha® Gleitmatte Rollstuhl

Mit der Alpha Gleitmatte Rollstuhl hat der Benutzer die Möglichkeit, sich selbstständig oder mit Hilfe einer zweiten Person im Rollstuhl oder Stuhl nach hinten zu bewegen.



Das spezielle Material der Alpha Gleitmatte Rollstuhl verhindert ein Vorrutschen des Benutzers

Bestell-Nr. PM-2070
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 500 x 450 mm
 Material Cotton/Naturdrell atmungsaktiv




Alpha® Gleitmatte Rollstuhl

Die zwei Zugschlaufen erlauben bei der Alpha Gleitmatte Rollstuhl PM-2078 ein besonders komfortables und ergonomisches Zurückziehen des Benutzers in die Sitzhaltung.



Bestell-Nr. PM-2078
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 1350 x 430 mm
 Material Cotton/Naturrell atmungsaktiv

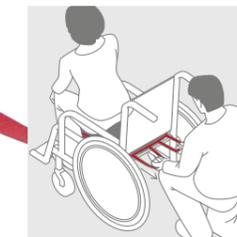


Alpha® Gleitmatte Rollstuhl mit Zugschlaufen



Die Alpha Gleitmatte Rollstuhl kann ganz einfach am Rollstuhl befestigt werden

Bestell-Nr. PM-2076
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.2007
 Größe 1300 x 450 mm
 Material Cotton/Naturdrell atmungsaktiv

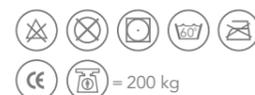

Durch die Griffe an der Alpha Gleitmatte Rollstuhl PM-2076 kann der Benutzer mit Hilfe einer anderen Person ohne großen Kraftaufwand zurückgezogen werden

Die Außenseite der Alpha Gleitmatte Rollstuhl besteht aus Cotton/Naturdrell, atmungsaktiv die Innenseite aus Nylon

Alpha® Transfertasche

Die Alpha Transfertasche eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung kleiner Hilfsmittel. Insgesamt acht Fächer mit Beschriftungsfeldern zur Kennzeichnung bieten genügend Platz zum Verstauen der Petermann Gleitmatten, Aufrichthilfen, Rutschbretter usw. An der Rückseite der Alpha Transfertasche befinden sich Kunststoffhaken zur Befestigung an einem Pflegebett oder Pflegewagen.

Bestell-Nr. PM-7170
 Größe 750 x 430 x 150 mm
 Material PES/PVC





Alpha® Drehscheibe

Die Alpha Drehscheibe kann stehfähigen Patienten das Umsetzen, z. B. zwischen Bett und Rollstuhl, erleichtern. Aufgrund der Start-Stopp-Funktion der Alpha Drehscheibe können die Bewegungen genau kontrolliert werden. Wir empfehlen den Einsatz der Alpha Drehscheibe in Kombination mit den Haltegürteln Alpha oder OnlyU.



Die Oberfläche ist mit einem rutschfesten Material versehen, um ein Wegrutschen der Füße zu vermeiden

Alpha Drehscheibe mit Start-Stopp-Funktion durch unterschiedliche Belastungszonen



Die Alpha Drehscheibe hat einen Griff zum bequemen Transport und zur platzsparenden Lagerung

Drehscheibe	
Bestell-Nr.	PM-5080
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.0005
Durchmesser	400 mm
Material	ABS-Kunststoff

Drehscheibe, Fußstuhl und Haltegürtel im Set


Bestell-Nr.	PM-5085
bestehend aus:	
Drehscheibe	PM-5080
Fußstuhl	PM-8090
Haltegürtel (M)*	PM-6014

*weitere Größen auf Anfrage




Alpha® Fußstuhl

Der Alpha Fußstuhl dient der Unterstützung des Patienten bei Toilettengängen und Transfers vom Bett in den Rollstuhl. Er erhöht die Standfläche für den Patienten. Der Alpha Fußstuhl kann alleine oder in Kombination mit der Drehscheibe angewendet werden.

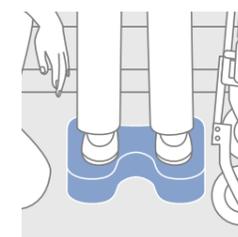

Der Alpha Fußstuhl hilft, Höhenunterschiede von z. B. Bett, Rollstuhl oder Toilette zu überwinden

Bestell-Nr.	PM-8090
Größe	320 x 380 x 85 mm
Material	Polyethylen

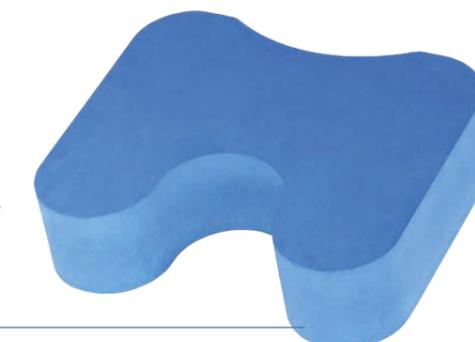

Alpha® Antigleitkissen


Das Alpha Antigleitkissen wird unter die Oberschenkel eines im Bett sitzenden Patienten eingelegt. Durch die Antigleiteigenschaften der Oberfläche wird eine sanfte und bequeme Stütz- und Sicherungsfunktion erreicht.

Ein Herunterrutschen des Patienten aus der Sitzposition in das Bett wird mit dem Alpha Antigleitkissen erheblich verzögert.

Bestell-Nr. PM-8050
Größe 400 x 500 mm
Material Polyethylen



Das Alpha Antigleitkissen sichert die Sitzposition nach dem Aufrichten des Kopfteils im Bett

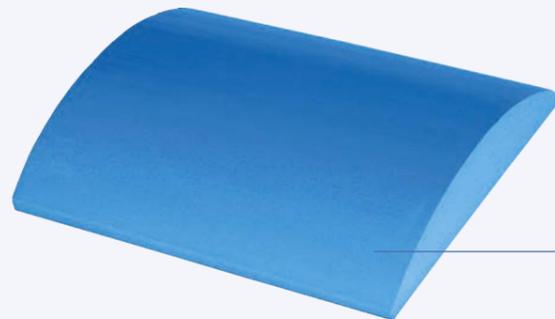


Das Alpha Antigleitkissen verhindert das Herunterrutschen eines im Bett sitzenden Patienten

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte verhindert ein Wegrutschen der Füße im Bett. Eine Antirutschmatte erhöht den Reibungswiderstand zu 100%. Im Bett unter die Füße des Patienten gelegt, vermittelt die Antirutschmatte Rutschsicherheit während des Um- oder Hochlagerns.


Das Wegrutschen der Matte wird durch die speziellen Produkteigenschaften verhindert

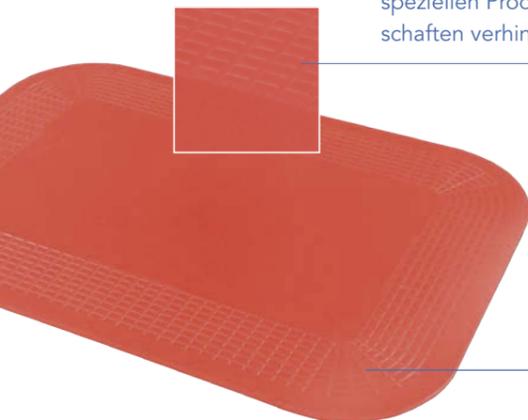

Die Antirutschmatte bietet dem Patienten bei einer Bewegung in Richtung Kopfende die Möglichkeit sich mit den Füßen abzustützen

Antirutschmatte
Bestell-Nr. PM-7010 rot
Bestell-Nr. PM-7010-1 blau
Größe 350 x 250 mm

Antirutschmatte groß
Bestell-Nr. PM-7011
Größe 450 x 380 mm
Material Dickfolie

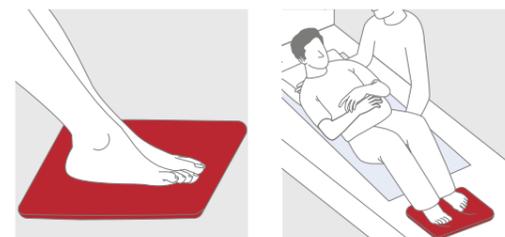


Alpha® Soft-Drehscheibe


Die Alpha Soft-Drehscheibe ist ein sehr einfaches Hilfsmittel um Patienten, alleine oder mit vertrauter Hilfe, seitliche Drehbewegungen aus Sitzpositionen heraus erheblich zu erleichtern. Legen Sie die Alpha Drehscheibe bei Benutzung in einem Bett ca. 25 cm vom Bettrand entfernt mittig ins Bett. So erreichen Sie aus der Drehbewegung eine optimale Liegeposition in der Bettmitte. Nehmen Sie während der Sitzposition auf dem Bett immer die Höhenverstellung des Bettes zu Ihrer Sicherheit zu Hilfe.



Die Alpha Soft-Drehscheibe ist aus atmungsaktivem Cotton/Naturdrell

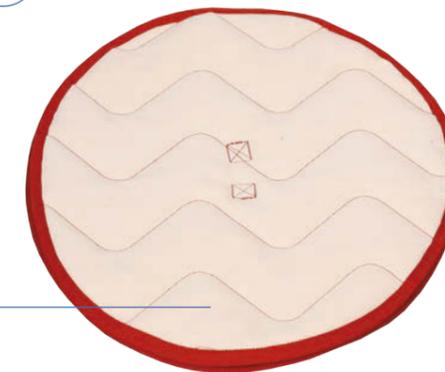

Bestell-Nr. PM-5070
Durchmesser 460 mm
Material Cotton/Naturdrell atmungsaktiv

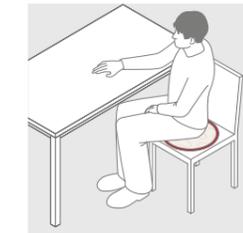


Die Alpha Soft-Drehscheibe erleichtert seitliche Drehbewegungen aus der Sitzposition

Alpha® Bettleiter

Die Alpha Bettleiter dient als Aufrichthilfe und besteht ausschließlich aus Nylon. Deshalb liegt sie im Gegensatz zur Standard-Bettleiter nicht schwer auf dem Bett und kann geräuscharm abgelegt werden. Sie unterstützt den Patienten im Sinne des physiologischen Bewegungsmusters beim Aufrichten des Oberkörpers bis hin zum aufrechten Sitzen.



Die Alpha Bettleiter ermöglicht das selbstständige Aufrichten im Bett

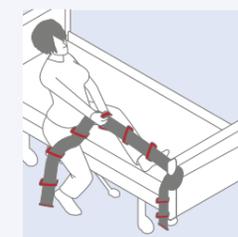

Die gepolsterten Griffe erlauben einen sicheren Halt und ermöglichen durch versetzte Anordnung eine leichte Handhabung

Bestell-Nr. PM-6090
Größe 1700 x 80 mm
Material Polyester



Wird mit der Schlaufe am Bett befestigt

Alpha® Röntgenmatte

Die Alpha Röntgenmatte ist speziell als Röntgen-tischauflage zur Lagerung von Patienten konzipiert worden.

Die angenehme Oberfläche und die Polsterung bieten dem Patienten eine bequeme Auflage während des Röntgens. Die Oberfläche ist leicht und einfach zu desinfizieren. Durch die hohe Belastbarkeit, die gleitfähige Unterseite und die seitlichen Griffleisten an den Längsseiten ist das Verschieben des Patienten auf dem Röntgentisch für die Pflegekräfte problemlos möglich.



Röntgenmatte 60 cm

Bestell-Nr.	PMF-8200
Größe	1900 x 600 mm

Röntgenmatte 85 cm (o. Abb.)

Bestell-Nr.	PMF-8220
Größe	1900 x 850 mm

Material	PVC/PES
----------	---------




Die seitlichen Griffleisten aus röntgenfähigem Material eignen sich hervorragend zum Justieren des Patienten auf dem Röntgentisch



Alpha® Röntgenraupe

Die Alpha Röntgenraupe ist das ideale Hilfsmittel für den sicheren und für Patient und Pflegeperson schonenden Umgang mit der Röntgenkassette am Patienten. Die Alpha Röntgenraupe ermöglicht es, Röntgenplatten aller gängigen Größen unter einen liegenden Patienten zu schieben, ohne ihn anheben zu müssen.

Das innovative Prinzip, der in sich rotierenden Alpha Röntgenraupe, mit der die Röntgenkassette einfach unter dem Patienten eingeschoben wird, stellt einen großen Fortschritt in der Anwendung von Röntgenkassetten am Patienten dar. Um den strengen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, kann die Alpha Röntgenraupe problemlos wischdesinfiziert werden. Das angebotene Set beinhaltet außerdem Einweg-Schutzfolien für die Röntgenkassette, um einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten.

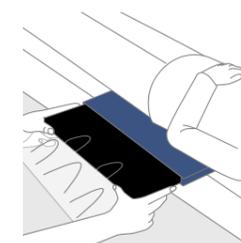

Neu: abgerundete Kanten und höhere Steifigkeit für noch einfachere Handhabung und verbesserte Gleiteigenschaften

Röntgenraupe-Set 3-teilig

Bestell-Nr.	PMF-8265
2 x Röntgenraupe	PMF-8260
1 x Schutzfolie	PMF-8261

Röntgenraupe-Set 6-teilig

Bestell-Nr.	PMF-8266
5 x Röntgenraupe	PMF-8260
1 x Schutzfolie	PMF-8261

Röntgenraupe

Bestell-Nr.	PMF-8260
Größe	540 x 420 mm
Material	Nylon/PE

Röntgenraupen-Set XL 3-teilig

Bestell-Nr.	PMF-8365
2 x Röntgenraupe	PMF-8360
1 x Schutzfolie	PMF-8361

Röntgenraupen-Set XL 6-teilig

Bestell-Nr.	PMF-8366
5 x Röntgenraupe	PMF-8360
1 x Schutzfolie	PMF-8361

Röntgenraupe XL

Bestell-Nr.	PMF-8360
Größe	540 x 570 mm
Material	PVC/PES



Schutzfolie

Zubehör für Röntgenraupe

Schutzfolie

Bestell-Nr.	PMF-8261
Größe	450 x 800 mm
Material	LDPE

Schutzfolie XL

Bestell-Nr.	PMF-8361
Größe	510 x 800 mm
Material	LDPE

Perforiert auf einer Rolle zu 100 Stück

Alpha® Rollboard Vision

Das Alpha Rollboard Vision überzeugt beim souveränen und rückschonenden Handling des Patiententransfers. Kompromisslose Transfer- und Pflegesicherheit wird hier in der modernen Verbindung von Hygieneanforderungen, Qualität, Form und Funktion umgesetzt. Alle Alpha Rollboards sind für den Einsatz bei Röntgen- und MRT-Verfahren geeignet.



Bezug maschinenwaschbar und wischdesinfizierbar

Hygienisch unkritische und semikritische Anwendungen und Einsatzorte

Einfache Desinfektion – Bezug maschinenwaschbar bis 60 °C



Schutzfolie

Hygienisch semikritische und kritische Anwendungen und Einsatzorte

Einweg-Schutzfolie über dem Bezug für einfache und schnelle Handhabung

Siehe OnlyU® Einweg-Schutzfolie: Seite 53



PEM-Einweg-Bezug

Hygienisch semikritische und kritische Anwendungen, Einsatzarten und Einsatzorte

PEM-Einweg-Bezug, ohne Nylonbezug anwendbar, für einfache und schnelle Handhabung



Siehe OnlyU® Rollboard Vision PEM: Seite 52

Bestell-Nr.	PMF-9050 Neo Genius
Größe	850 x 450 mm, 2-fach faltbar
Textiler Bezug	PMF-9051
Bestell-Nr.	PMF-9075 (Ambulanz Neo)
Größe	850 x 450 mm, faltbar
Textiler Bezug	PMF-9076
Bestell-Nr.	PMF-9085
Größe	950 x 500 mm, faltbar
Textiler Bezug	PMF-9086/96
Bestell-Nr.	PMF-9095
Größe	950 x 500 mm, nicht faltbar
Textiler Bezug	PMF-9086/96
Bestell-Nr.	PMF-9150
Größe	1 500 x 600 mm, faltbar
Textiler Bezug	PMF-9151
Bestell-Nr.	PMF-9155
Größe	1 500 x 600 mm, nicht faltbar
Textiler Bezug	PMF-9151
Bestell-Nr.	PMF-9170
Größe	1 800 x 500 mm, faltbar
Textiler Bezug	PMF-9171
Bestell-Nr.	PMF-9180
Größe	1 950 x 500 mm, faltbar
Textiler Bezug	PMF-9181
Bestell-Nr.	PMF-9185
Weitere Infos siehe Seite 49	

Material Rollboard Polyethylen
Material Bezug Polyamid



Rollboard = 200/300 kg

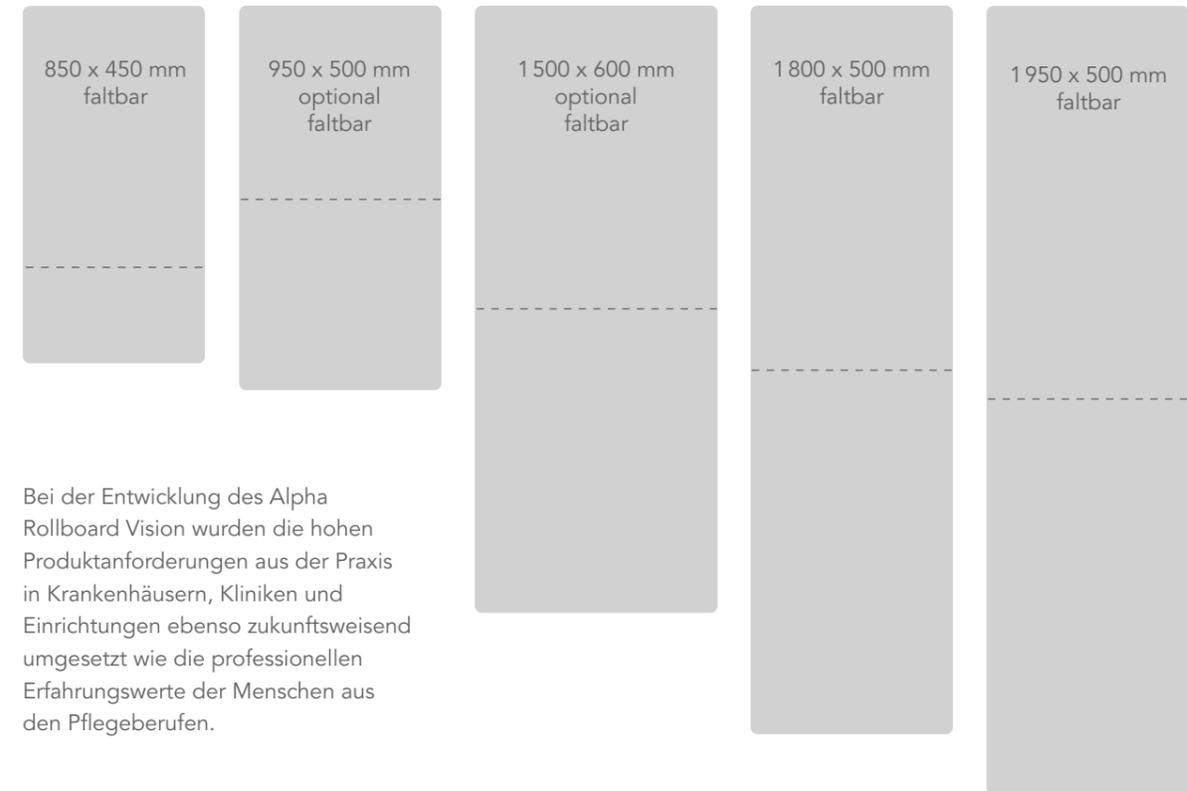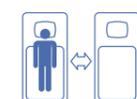


Bei der Entwicklung des Alpha Rollboard Vision wurden die hohen Produktanforderungen aus der Praxis in Krankenhäusern, Kliniken und Einrichtungen ebenso zukunftsweisend umgesetzt wie die professionellen Erfahrungswerte der Menschen aus den Pflegeberufen.

Der patentierte Kern des Alpha Rollboard Vision bietet zahlreiche Vorteile; die innere Oberfläche ermöglicht z. B. eine schnelle und gründliche Desinfektion




Stöße werden durch den flexiblen Alpha Rollboard Vision-Kern absorbiert. Dabei bietet das Rollboard Vision sichere Stabilität und von unabhängigen Prüfinstituten geprüfte Belastbarkeit bis zu 300 kg

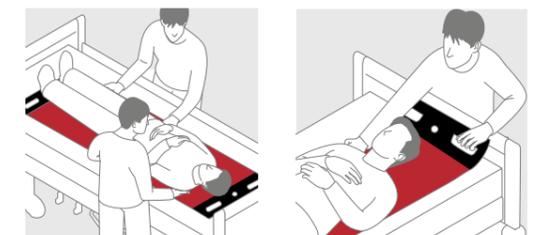



Alpha® Rollboard Vision für große Überbrückungswege

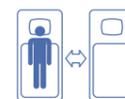

Der flexible Rollboard-Bezug sorgt für einen extra großen Überbrückungsweg




Zugschlaufen ermöglichen einen berührungsarmen Transfer

Bestell-Nr.	PMF-9185
Größe	1 800 x 500 mm, faltbar mit Zugschlaufen und Haltegriffen
Ersatzbezug	PMF-9186
Patent-Nr.	10 2009 048 319
Material Rollboard	Polyethylen
Material Bezug	Polyamid/PES

Bezug




Rollboard

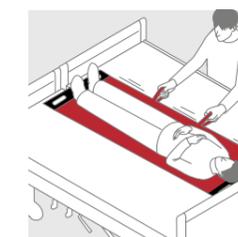

Alpha® Wandhalterung für Rollboards

Die Alpha Wandhalterung sorgt für komfortables Aufbewahren und Entnehmen der Rollboards. Sie bietet Platz für insgesamt zwei Rollboards. Die Wandhalterung kann mühelos in der entsprechenden Arbeitshöhe befestigt werden und bietet Platz für insgesamt zwei Rollboards.

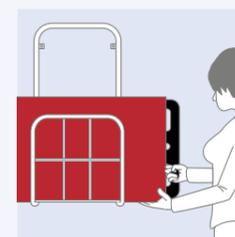

Bestell-Nr.	PMF-0950
Größe	H 750 x B 450 x T 90 mm
Material	Edelstahl



Alpha® Wandhaken für Rollboards

Mit der mobilen Wandhalterung, die sich durch den Sauger an allen glatten Oberflächen befestigen lässt, wird das Alpha Rollboard stets bedarfsgerecht am Einsatzort aufbewahrt. Die Sicherheitswippe des Saugers sorgt für permanente Überprüfung des Vakuums, um ein Abrutschen des Halters zu verhindern.



Bestell-Nr.	PMF-0850
Größe	D 120 mm
Material	bruchsicherer Kunststoff



ONLYU 
TRANSFERHILFEN

OnlyU® Rollboard Vision PEM

Nirgends ist das OnlyU Rollboard Vision PEM so überzeugend wie beim souveränen und rückschonenden Handling des Patiententransfers. Kompromisslose Transfer- und Pflegesicherheit wird hier in der modernen Verbindung von Hygieneanforderungen, Qualität, Form und Funktion umgesetzt. Alle OnlyU Rollboards sind für den Einsatz bei Röntgen- und MRT-Verfahren geeignet.

Bezug maschinenwaschbar und wischdesinfizierbar

Hygienisch unkritische und semikritische Anwendungen und Einsatzorte

Einfache Desinfektion – Bezug maschinenwaschbar bis 60 °C

Siehe Alpha® Rollboard Vision: Seite 46

Schutzfolie


Hygienisch semikritische und kritische Anwendungen und Einsatzorte
Einweg-Schutzfolie über dem Bezug für einfache und schnelle Handhabung

PEM-Einweg-Bezug

Hygienisch semikritische und kritische Anwendungen, Einsatzarten und Einsatzorte
PEM-Einweg-Bezug, ohne Nylonbezug anwendbar, für einfache und schnelle Handhabung

Bestell-Nr. Set	PMF-9089
Korpus PMF-9085	950 x 500 mm, faltbar
PEM-Einweg-Bezug	PM-9090
Bestell-Nr. Set	PMF-9099
Korpus PMF-9095	950 x 500 mm, nicht faltbar
PEM-Einweg-Bezug	PM-9090
Bestell-Nr. Set	PMF-9153
Korpus PMF-9150	1 500 x 600 mm, faltbar
PEM-Einweg-Bezug	PMF-9152
Bestell-Nr. Set	PMF-9157
Korpus PMF-9155	1 500 x 600 mm, nicht faltbar
PEM-Einweg-Bezug	PMF-9152
Bestell-Nr. Set	PMF-9175
Korpus PMF-9170	1 800 x 500 mm, faltbar
PEM-Einweg-Bezug	PMF-9172
Bestell-Nr. Set	PMF-9189
Korpus PMF-9180	1 950 x 500 mm, faltbar
PEM-Einweg-Bezug	PMF-9172
Material Rollboard	Polyethylen

Rollboard
 = 200/300 kg

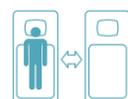


OnlyU® Einweg-Schutzfolie


Einweg-Schutzfolie auf Rolle/Zubehör für Rollboard Vision mit textilem Bezug

Bestell-Nr.	PMF-0191
Größe	900 x 545 mm
Menge	110 Stück auf Rolle
passend für	PMF-9085, PMF-9095

Bestell-Nr.	PMF-0192
Größe	1 800 x 545 mm
Menge	55 Stück auf Rolle
passend für	PMF-9170

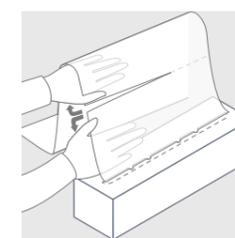

Die Verwendung des PEM-Einweg-Bezugs reduziert das Risiko von Kreuzinfektionen und spart zeit- und kostenaufwendige Desinfektionsprozesse

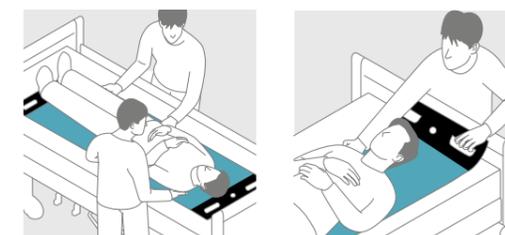


OnlyU® PEM-Einweg-Bezug

Bestell-Nr.	PMF-9077
Abmessung Stück	475 x 850 mm
Menge	50 Stück gefaltet in Spendertasche
passend für	PMF-9075, PMF-9050

Bestell-Nr.	PMF-9090
Abmessung Stück	900 x 530 mm
Menge	120 Stück auf einer Rolle
passend für	PMF-9085, PMF-9095

Bestell-Nr.	PMF-9152
Abmessung Stück	1 600 x 610 mm
Menge	70 Stück auf einer Rolle
passend für	PMF-9150, PMF-9155

Bestell-Nr.	PMF-9172
Abmessung Stück	1 800 x 530 mm
Menge	60 Stück auf einer Rolle
passend für	PMF-9170

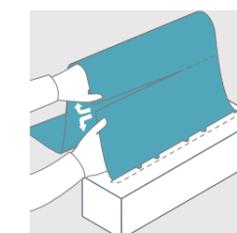



OnlyU® PEM-Einweg-Gleitfolie

Die OnlyU PEM-Einweg-Gleitfolie ist eine Schlauchfolie – hautverträglich, reißbar, latexfrei, biokompatibel und lebensmittelecht. Die besondere Zusammensetzung des Materials gewährleistet die hohe Gleitfähigkeit beim Einsatz in der täglichen Pflege. Die OnlyU PEM-Einweg-Gleitfolie wird für alle möglichen Positionswechsel und Transfers von Patienten verwendet.

Der Einweggebrauch der OnlyU PEM-Einweg-Gleitfolie sorgt für schnelle und vor allem hygienische Transferanwendungen. Rückengerecht und Kraft sparend für die Pflegekräfte, einfach und schonend für den Patienten, reduzieren Sie mit der OnlyU PEM-Einweg-Gleitfolie die Reibungskräfte, wenn Sie liegende oder sitzende Patienten bewegen und/oder umlagern.



PEM-Einweg-Gleitfolie 60 cm

Bestell-Nr. PM-060.60-100
Größe: 600 mm x 100 m

PEM-Einweg-Gleitfolie 60 cm mit Abrollkarton und Folienmesser

Bestell-Nr. PM-060.65-100
Größe 600 mm x 100 m

PEM-Einweg-Gleitfolie 70 cm

Bestell-Nr. PM-060.70-100
Größe 700 mm x 100 m

PEM-Einweg-Gleitfolie 70 cm mit Abrollkarton und Folienmesser


Bestell-Nr. PM-060.75-100
Größe 700 mm x 100 m

Material LDPE



Die OnlyU PEM-Gleitfolie kann in jeder gewünschten Länge abgeschnitten werden

Gearbeitet wie ein Schlauch, lässt sich die OnlyU PEM-Einweg-Gleitfolie sehr ähnlich wie eine Alpha Gleitmatte verwenden

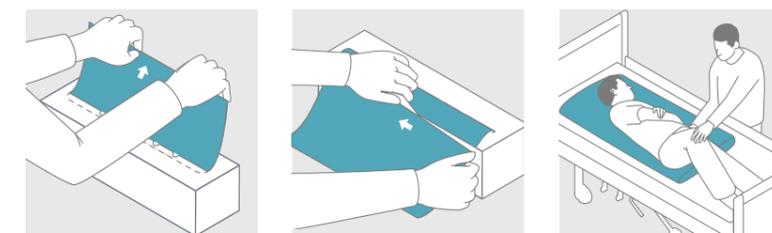

Abroller für OnlyU® Gleitfolie

OnlyU Abroll- und Schneidevorrichtung zur Aufnahme der 100-Meter-Rolle Gleitfolie



Die Gleitfolie kann in jeder gewünschten Länge abgeschnitten werden


Gearbeitet wie ein Schlauch, lässt sich die OnlyU PEM-Einweg-Gleitfolie sehr ähnlich wie eine Alpha Gleitmatte verwenden

Abroller für Rollenbreite 600 mm

Bestell-Nr. PM-060.10

Abroller für Rollenbreite 700 mm



Bestell-Nr. PM-060.30

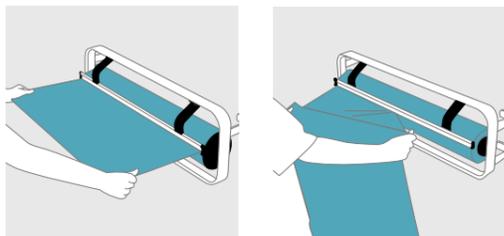

Halterung für OnlyU® Produkte

Die OnlyU Halterung wurde für die praktische Aufbewahrung der Einweg-Schutzfolie, des PEM-Einweg-Bezugs sowie für die PEM-Einweg-Gleitfolie entwickelt. Die Wandhalterung kann mühelos in der entsprechenden Arbeitshöhe befestigt werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine verpackte Ersatzrolle in dem dafür vorgesehenen Korb aufzubewahren.

Bestell-Nr. PMF-0200
Größe H 460 x B 700 x T 180 mm
Material Edelstahl
 inkl. Korb für Ersatzfolie

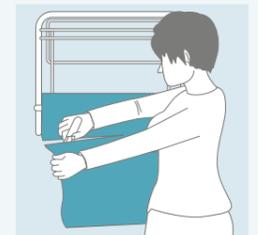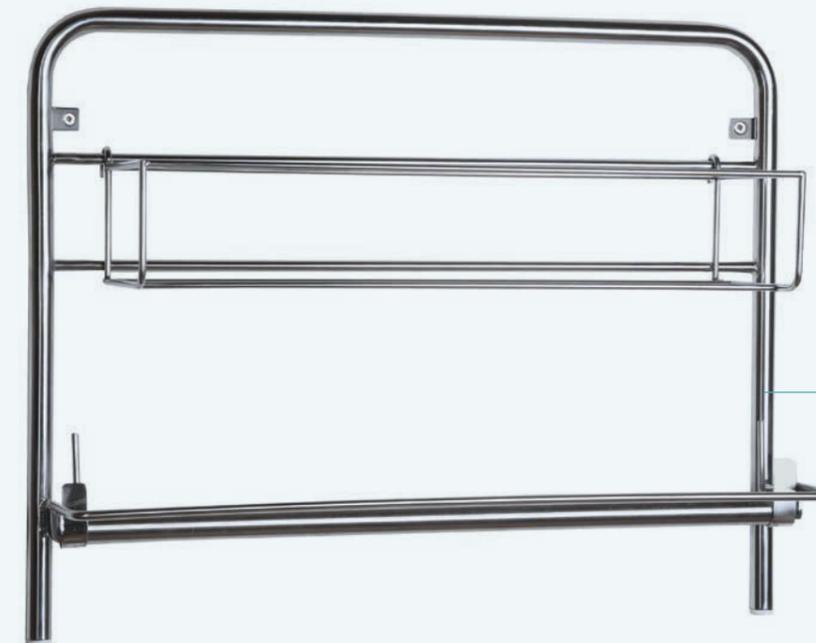

Praktische Wandhalterung für Folienrollen

Wirtschaftlichkeit

Das beste Angebot für Sie

Moderne Gesundheitsökonomie betrachtet Wirtschaftlichkeit als Summe vieler Faktoren. Die Petermann GmbH bietet Ihnen neben fairen Anschaffungspreisen für Hilfsmittel mit langjährigen Lebenszyklen auch patientenbezogene Einmalprodukte sowie viele Möglichkeiten, auf das Petermann Know-how beim Umgang mit den Produkten und Schulungen zurückzugreifen.



OnlyU® Einweg-Haltegürtel 5er Pack

Professionelle Unterstützung beim Bewegen des Patienten ohne hygienische Risiken ermöglicht der OnlyU Einweg-Haltegürtel. Der OnlyU Einweg-Haltegürtel verbleibt während seines Aufenthaltes in der Klinik beim Patienten und kann anschließend nachhaltig entsorgt werden.

Mit dem OnlyU Einweg-Haltegürtel wird die Verbreitung von multiresistenten sowie weiteren Keimarten eingedämmt und Kosten für aufwändige Wasch- und Logistikkvorgänge werden eingespart.



Bestell-Nr.	PM-070.10-5
Größe	1 600 x 100 mm
Material	Polyamid

CE = 160 kg



OnlyU® Einweg-Beingurt 5er Pack

Bestell-Nr.	PM-075.10-5
Größe	1 130 x 100 mm
Material	Polyamid

CE = 160 kg



blue 
MOTION
TRANSFERHILFEN

Blue Motion® Gleittuch

in vielen
Größen

Bestell-Nr. BM-0560 *
Größe 520 x 600 mm

Bestell-Nr. BM-0652 *
Größe 600 x 520 mm

Bestell-Nr. BM-0752 *
Größe 700 x 520 mm

Bestell-Nr. BM-S-0790
Größe 700 x 900 mm

Bestell-Nr. BM-S-0907
Größe 900 x 700 mm

Bestell-Nr. BM-S-0910
Größe 900 x 1000 mm

Bestell-Nr. BM-S-0911
Größe 900 x 1100 mm

Bestell-Nr. BM-S-1170
Größe 1100 x 700 mm

Bestell-Nr. BM-S-1190
Größe 1100 x 900 mm

Bestell-Nr. BM-S-1370
Größe 1300 x 700 mm

Bestell-Nr. BM-S-1970
Größe 1950 x 700 mm

Material Polyamid

* empfohlen zur Verwendung im Nassbereich
oder in Kombination mit dem Rutschbrett

Sondergrößen
auf Anfrage



Blue Motion® Antirutschmatte

10er Pack

Bestell-Nr. BM-7005
Größe 255 x 355 mm
Material Dickfolie



Blue Motion® Rutschbrett

Das flexible Blue Motion Rutschbrett ermöglicht das Umsetzen eines Patienten, z. B. von der Bettkante in den Rollstuhl oder auf die Toilette.



Bestell-Nr. BM-5000
Hilfsmittel-Nr. 22.29.01.3019
Größe 740 x 240 mm
Material Polyethylen



Blue Motion® Gleitlaken

mit Kordel

Bestell-Nr. BM-K-1975
Größe 1950 x 730 mm
Material Polyamid
Sondergrößen auf Anfrage



Blue Motion® Wendelaken

Set 3-teilig

Das BlueMotion Wendelaken ist ein zweiteiliges Hilfsmittel zur Reduzierung der Reibungskräfte beim Umlagern und Bewegen von Personen während der Pflege im Bett.



Wendelaken-Set, 3-teilig

Bestell-Nr. BM-1600
bestehend aus:
Oberlaken
2000 x 1400 mm BM-1600.1
Spannlaken
2000 x 900 mm BM-1600.2
Blue Motion
Antirutschmatte BM-7004 (2 Stück)
**Material Ober-
und Spannlaken** Cotton/Polyamid





EVAKUIERUNG



Das Petermann Evakuierungstuch eignet sich auch zur Fensterrettung

Evakuierungstuch

Das Petermann Evakuierungstuch findet seinen Einsatzbereich in Einrichtungen mit dauerhaft bettlägerigen Menschen. Es lässt sich in einer Rettungssituation extrem leicht und sicher über alle Arten von Fußböden und Treppen von einer Person aus dem Gefahrenbereich ziehen. An großen Gurtgriffen jeweils am Kopf- oder Fußende und zusätzlich in der Mitte der beiden Längsseiten wird die Matratze aus dem Bett gezogen und über den Fußboden in eine sichere Zone gebracht.

Bis zu 20 Jahre Garantie

Bestell-Nr.: PM-EVA-7053-H
für Bettgröße: Länge: 1900–2050 mm
Breite: 800–1000 mm

Bestell-Nr.: PM-EVA-7053-S
für Bettgröße: Länge: 1900–2050 mm
Breite: 1000–1400 mm


Material: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe mit
Lüftungsöffnungen

passend für alle Betten/Lattenroste/
Matratzentypen


schwer entflammbar
TÜV-geprüft nach der für Evakuierungsmatten
notwendigen DIN EN 1865 Norm für
Krankentransportprodukte

   = 200 kg

 im Wäschenetz

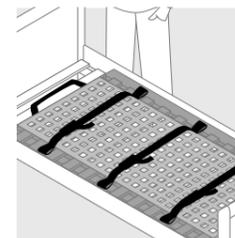

Legen Sie das Petermann Evakuierungstuch in die Mitte des Bettes direkt auf den Bettrahmen.

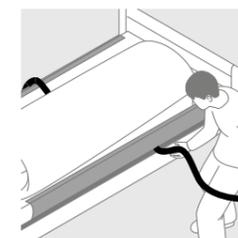


Rettungssituation: Ziehen Sie die zwei Gurtstecker mit dem Gurtband aus der Positionierung unter der Matratze hervor.



Knien Sie sich auf das Bett, ziehen Sie die gegenüberliegenden Gurtschnallen aus der Positionierung unter der Matratze hervor.




Ziehen Sie nun die Gurte nacheinander an den losen Enden an und ziehen Sie die Gurte so fest wie möglich zu.

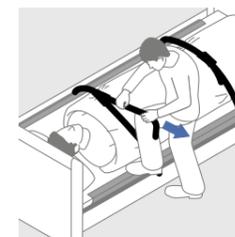


Für die liegende Person entsteht so eine schützende U-Form der Matratze.



An den Gurtgriffen am Fuß- oder Kopfende ziehen Sie das Petermann Evakuierungstuch mit der Matratze aus dem Bett.

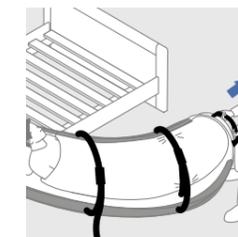

Über das Seitenteil des Bettes ziehen Sie das Petermann Evakuierungstuch mit der Matratze auf den Fußboden.

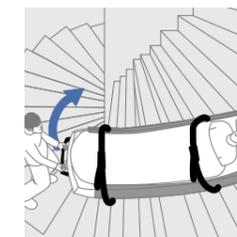

Wenn nötig, kann der Patient die Treppe abwärts in einen sicheren Bereich gezogen werden.



PETERMANN®
Hilfsmittel für immobile Menschen

MADE IN GERMANY

Die Petermann GmbH ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485, Medizinprodukte –
Qualitätsmanagementsystem für den Geltungsbereich
Design, Entwicklung und Vertrieb von Hilfsmitteln
für immobile Menschen

